

CoaguChek® Pro II

Måling af en kapillær blodprøve



1. Indfør kodechip




2. Vælg patienttest



3. Indtast eller scan bruger- og patient-id



4. Indfør teststrimmel

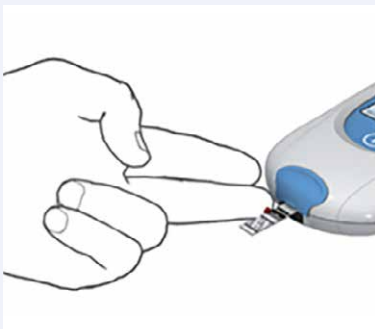

5. Stik på siden af en ren finger-spids, og påfør første blod-dråbe til teststrimmel max. 15 sekunder efter stik



6. Aflæs resultat

Sådan anvendes CoaguChek® Pro II

Touchskærmen

Brug kun fingeren (også ved brug af handsker) eller en pen, der er specielt beregnet til touchskærme til at berøre skærmen. Spidse eller skarpe genstande kan beskadige touchskærmen.

Før blodprøvetagning

1. Vask hænderne med sæbe, og tør dem grundigt. Sørg for, at der er god blodcirkulation i hænderne. Desinficer stedet til blodprøvetagningen. Ved vask og desinficering af patientens finger skal man lade fingeren tørre helt. Vand eller desinficeringsmiddel på huden kan fortynde bloddråben og medføre falske resultater.
2. Benyt CoaguChek PT-teststrimler med tilsvarende kodechip. Teststrimlerne opbevares ved 2–30°C og kan anvendes til udløbsdato. Sæt straks låget omhyggeligt på beholderen efter udtagning af en teststrimmel.
3. Benyt fingerprikker, der er godkendt til professionelt brug, f.eks. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus.

Blodprøvetagning

1. Isæt kodechip og tænd instrumentet.
2. Tryk på knappen Patienttest.
3. Angiv bruger- og patient-id ved hjælp af tastaturet. Du kan også indlæse bruger- og patient-id via den indbyggede stregkodescanner. Tryk på knappen Scan, og scan brugerens stregkode med en afstand på ca. 10–20 cm. afhængigt af stregkodens størrelse. Instrumentet bipper, når stregkoden er aflæst.
4. Det blinkende teststrimmelsymbol beder dig isætte en teststrimmel. Tag en teststrimmel ud af beholderen, og luk straks beholderen igen.
5. Hold teststrimlen, så testnavnet vender opad, og skub teststrimlen ind i teststrimmelåbningen i den retning, pilene peger.
6. Timeglasssymbolet viser, at teststrimlen er ved at blive opvarmet.
7. Når bloddråbesymbolet blinker, og der tælles ned fra 3 minutter, er instrumentet klar til at udføre en måling.
8. Stik på siden af en fingerspids med fingerprikkeren, og stryg fingeren, indtil der dannes en bloddråbe. Undlad at trykke eller klemme hårdt på fingeren.
9. Påfør den første bloddråbe fra fingeren til det gennemsigtige prøvepåføringsområde øverst på teststrimlen inden 15 sekunder fra blodprøvetagningens start. Du vælger selv, om bloddråben påføres teststrimlen fra oven eller fra én af siderne.
10. Inden resultatet vises, udfører instrumentet en automatisk kvalitetskontrol af teststrimlen. Hvis kvalitetskontrollen godkendes, vises et flueben efter "QC".
11. Resultatet vises. Resultater, som ligger over eller under måleområdet, er markeret med symbolerne > (større end) eller < (mindre end).
12. Sluk instrumentet.

Ved produktspørgsmål bedes du kontakte Roche Diagnostics A/S på
tlf. 7020 0505 eller mail kundesupport.dk@roche.com

COAGUCHEK and BECAUSE IT'S MY LIFE er varemærker tilhørende Roche.

©2016 Roche

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52

www.coaguheck.dk
www.roche.dk