

Juzo ACS Light Vejledning – Overekstremitet.

Hånd- del – passer til venstre og højre hånd, to løse velcro, to comfort pressure pads

Put velcro på straps på ACS hånddel.

Til venstre hånd – Juzo mærkat vil være synligt på ydersiden af produktet

1. Før din venstre tommelfinger ind i tommelfingerhul i ACS hand- delen – produktlabel vil være på indersiden af bandagen på håndryggen.
2. Træk den øverste strap rundt om knoerne, omkring håndfladen, og hæft den på håndryggen på toppen af knoerne.
3. Træk den nederste strap rundt om toppen af håndledet, og hæft på håndryggen over håndledet.



Til højre hånd – Produktlabel vil være synligt på ydersiden af produktet

1. Før din højre tommelfinger ind i tommelfingerhul i ACS hånddelen – Juzo mærkat vil være på indersiden af bandagen på håndryggen.
 2. Træk den øverste strap rundt om knoerne, omkring håndfladen, og hæft den på håndryggen på toppen af knoerne.
 3. Træk den nederste strap rundt om toppen af håndledet, og hæft på håndryggen over håndledet.
- Klip label af



Arm- del – med velcro extender strap til øverst på armen, comfort pad.

Åben velcro, der sidder for enden af straps. Der sidder kun velcro på den ene side af bandagen.

1. Før armen igennem lineren i ACS arm- delen, og træk ACS armdelen op på armen, således at lommen til den comfort pad, der medfølger, sidder i albuebøjningen. (comfort pad anvendes ved behov). I begyndelsen af behandlingen kan det undlades at bruge liner, hvis den føles for stram.
2. Fæst en af de midterste straps, således ACS arm- delen holdes på plads. Fæst derefter alle velcro nede fra, indtil de alle sidder glat og behageligt. – juster ved behov. Den hvide syning skal sidde i albuebøjning, som vist i billede 3.
3. Hvis ærmet bruges sammen med en ACS hånddel, sørg for overlap.
4. Lille extender der medfølger arm- del, kan ved behov påsættes øverste strap på overarmen. Lettergør anlæggelse.

