

Cutimed® Sorbion®

Closing wounds. Together.

**Perfekt
samarbejde**

Cutimed® Sorbion®
– for effektiv
sårbehandling



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

INDHOLD

side 4	Hydration Response Technology
side 6	Egenskaber i detaljer
side 8	Egenskaber bliver til fordele
side 9	Cutimed® Sorbion® Sachet S Absorberer og tilbageholder
side 9	Cutimed® Sorbion® Sachet Extra Vores stærkeste primære forbindelse
side 10	Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star Sårbehandling i sin mest fleksible form
side 10	Cutimed® Sorbion® Sachet XL Sårbandage til store sår
side 11	Cutimed® Sorbion® Sachet Border Sårbandage med hudvenlig border
side 11	Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage Til katetre og dræn
side 12	Cutimed® Sorbion® Sana Atraumatisk sårbandage – beskytter og absorberer
side 13	Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star Fleksibel, atraumatisk sårbandage
side 14	Produktoversigt

CUTIMED® SORBION®

RESULTATER UDEN KOMPROMISSER

Cutimed® Sorbion® Sachet og **Cutimed® Sorbion® Sana** er effektive sårbandager, der egner sig til næsten alle middel til kraftigt væskende sår. Sårbandagerne anvender Hydration Response Technology, som på en fordelagtig og omkostningseffektiv måde imødekommer udfordringerne inden for moderne sårbehandling. Sammen med målrettet behandling hjælper **Cutimed® Sorbion®** med at lindre symptomerne og øge livskvaliteten for patienter med akutte og kroniske sår.




HYDRATION RESPONSE TECHNOLOGY

PERFEKT SAMSPIL MELLEM PRODUKTMATERIALERNE

Cutimed® Sorbion®-teknologien skiller sig ud i kraft af et ideelt samspil mellem forskellige faktorer. Takket være de perfekte produktkomponenter – den unikke fibermatrix, de geldannende polymerer og det ultralydsforseglet yderlag – opnås en sikker behandling af kraftigt væskende sår. **Cutimed® Sorbion®**-bandagerne lukker ekssudat inde i produktets kerne, hvilket sikrer et optimalt fugtigt sårmiljø og skaber ideelle betingelser for sårheling.


Fibermatrix og geldannende polymerer

- Høj absorptions- og retentionsevne for ekssudat (selv under kompression)
- Høj stabilitet
- Ideel balance mellem absorption af ekssudat og opretholdelse af optimal fugtighed

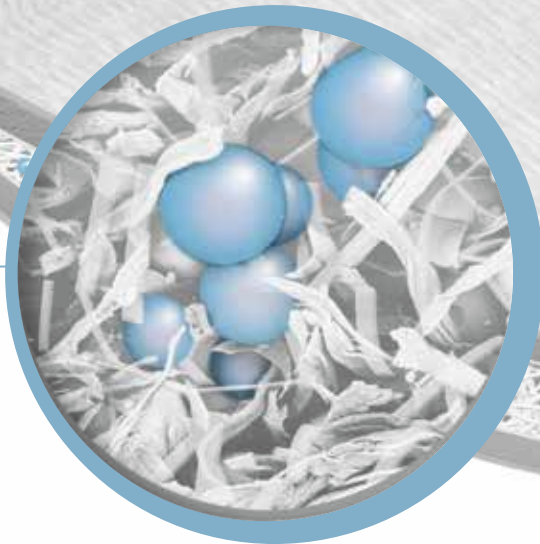


Ekspansionskant og ultralydsforsegling

- Ingen klæbestoffer og bindemidler
- Holdbar - selv ved fuld volumenkapacitet
- Flad ekspansion, selv når den er mættet

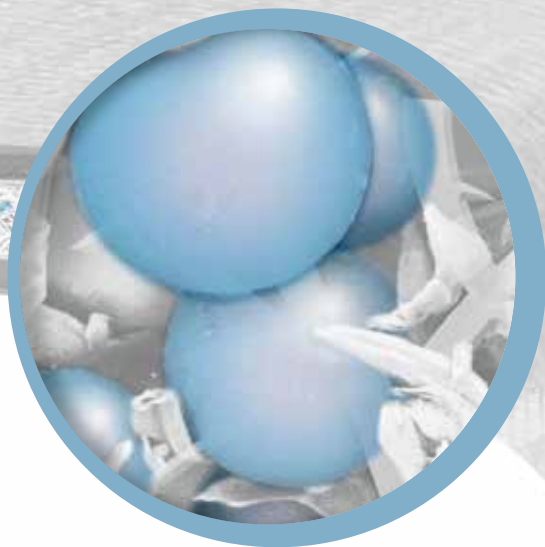

• Polymererne udvider sig ned mod såret

- Sikrer maksimal kontakt med sårbunden

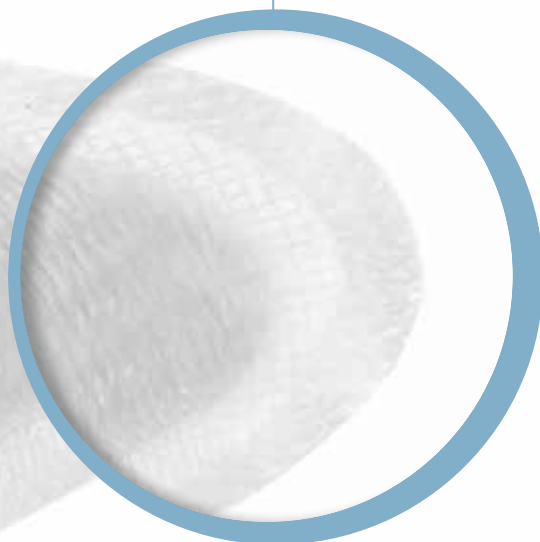


CUTIMED® SORBION®


EGENSKABER I DETALJER

Cutimed® Sorbion® har en unik indre kerne. De forskellige materialer arbejder sammen for at skabe en så effektiv sårheling som muligt. Effektiviteten hos **Cutimed® Sorbion®** er unik og skiller sig ud i forhold til andre lignende behandlingsløsninger.

INDVENDIG KERNE

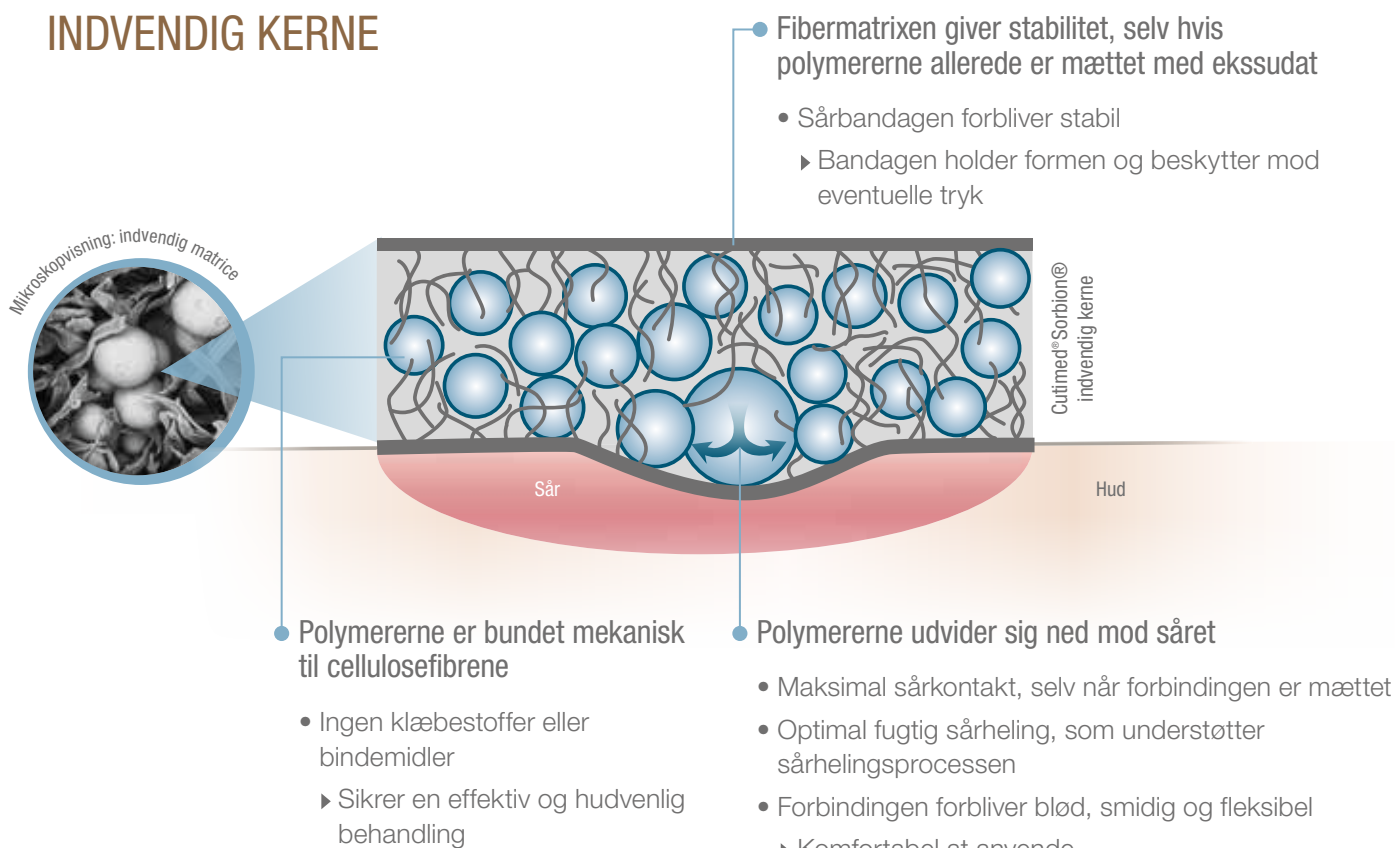


EKSPANSIONSKANT

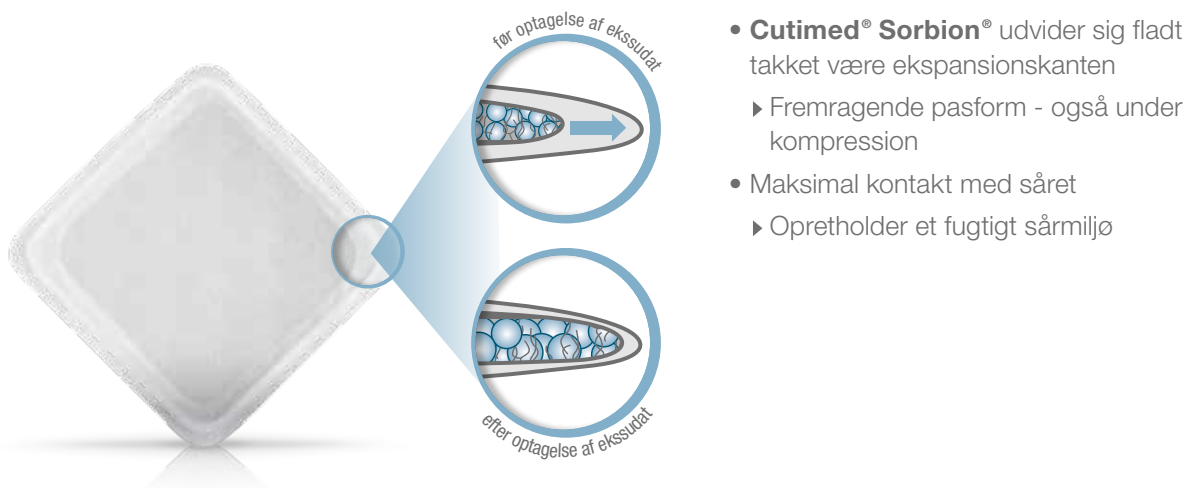

ABSORPTIONSEVNE

Cutimed® Sorbion® Sachet og **Cutimed® Sorbion® Sana** har en fremragende evne til meget hurtigt at absorbere store mængder eksudat og indkapsle det i inderkernen - også under kompression. Det betyder, at brug af **Cutimed® Sorbion®** mindsker antallet af bandageskift og dermed bliver behandlingen omkostningseffektiv.

Cutimed® Sorbion® – fremragende absorptionsevne

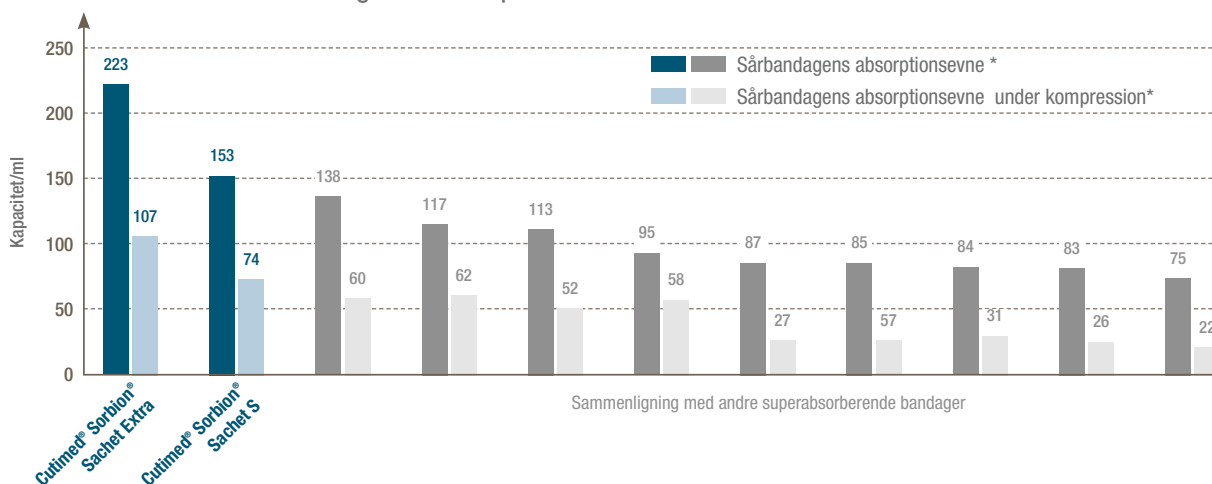

Resultater i ml pr. 10 x 10 cm forbinding. Evalueringen er baseret på EN 13726-1:2002 og udført af et uafhængigt laboratorium: SAS haggmann GmbH, Weberstraße 3, 72160 Horb am Neckar, Tyskland (servicelaboratorium for videnskabelige analyser); testresultaterne er afrundet.

* BSN medical GmbH, Data on File.

Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion®-bandagerne binder, centralt i bandagen, skadelige enzymer og proteaser. Enzymer og proteaser kan være en af årsagerne til stagnerende/kroniske sår.

Sikrer skånsom debridering

- **Cutimed® Sorbion® Sachet:**
Vævsrester og toksiner fjernes forsigtigt ved bandageesskift (blød debridering)
- **Cutimed® Sorbion® Sana:**
Understøtter autolytisk debridering



Blød debridering og vertical absorption med **Cutimed® Sorbion® Sachet**

Reducerer koncentrationen og aktiviteten af MMP'er


- Beskytter vævet mod skadelig påvirkning af for store mængder proteaser i såret

Immobiliserer mikroorganismer

- Reducerer risikoen for krydskontaminering ved at indkapsle bakterierne som transporteres med eksudatet

KOMPETENCER BLIVER TIL FORDELE

Det er først, når produkttegenskabernes fordele bliver tydelige for alle involverede parter, at de begynder at afspejle kompetencerne. De mange fordele understøtter ikke alene sårhelingsprocessen, men bidrager også i væsentlig grad til patientens livskvalitet og forenkler sundhedspersonalets faglige arbejde.

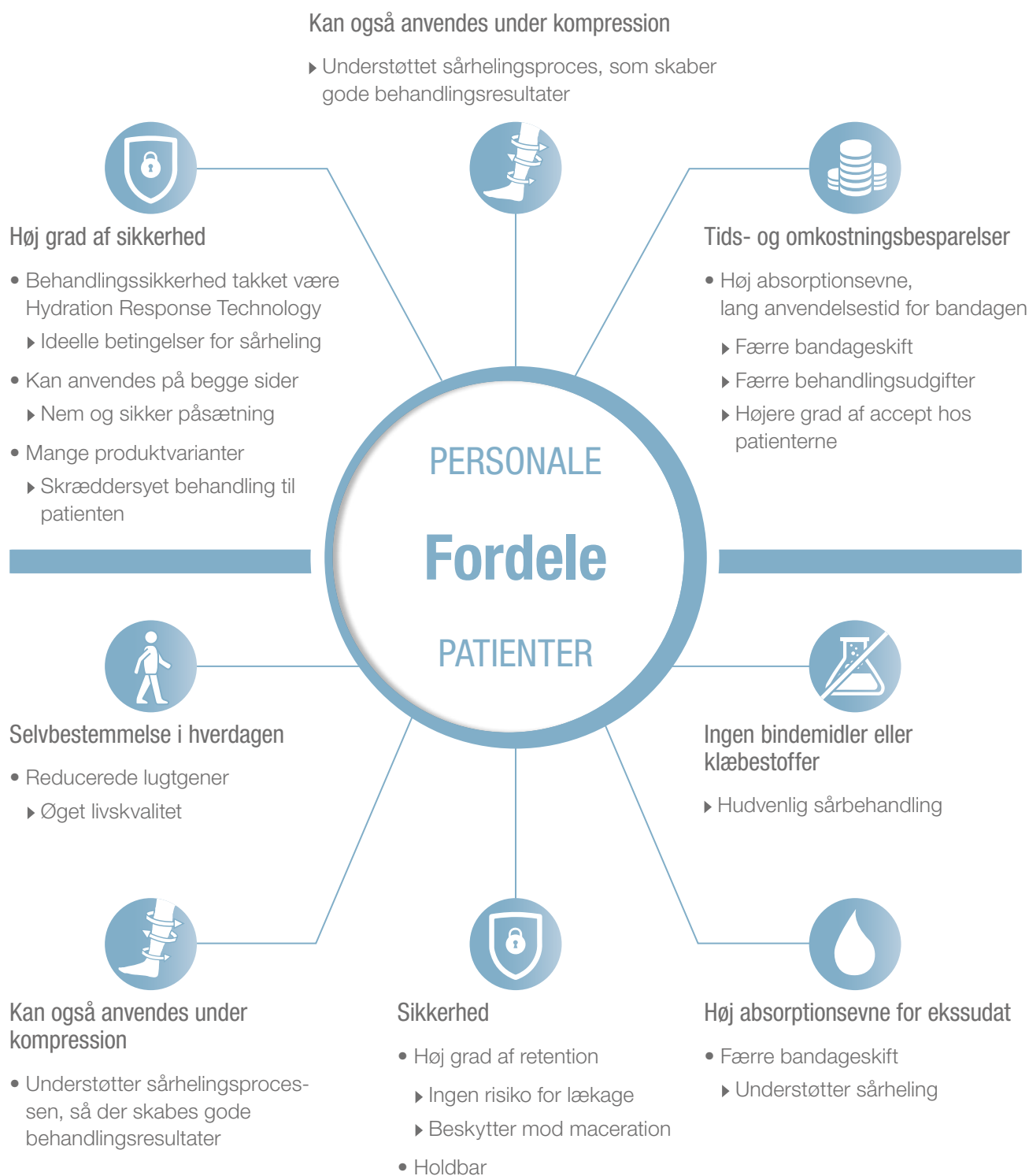

CUTIMED® SORBION® SACHET

Uanset om du har et sår, som kræver høj absorptionskapacitet, fleksibilitet mod kroppens konkurer eller en specialdesignet bandage, findes løsninger i det brede sortiment hos **Cutimed® Sorbion® Sachet**. Bandagen er let at applicere og gør med den unikke Hydration Response-Teknologi dem til det rette valg til behandling af kraftigt væskende sår.

CUTIMED® SORBION® SACHET S

Superabsorberende bandage

Den klassiske version, tilpasset mange forskellige sårtyper.

- Hurtig og sikker absorption
- Høj retention, selv under kompression
- Skaber en fugtigt sårmiljø
- Fjerner dødt væv



CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA

Superabsorberende bandage til ekstremt høje niveauer af sårekssudat

Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA har endnu højere absorption, retention og kapacitet til at binde patogener i såret end Sorbion S.

- Usædvanlig høj sugeevne
- Høj retension
- Skaber en fugtigt sårmiljø
- Fjerner dødt væv
- Kan anvendes under kompression

Cutimed Sorbion Sachet S/Extra:


- Venøs bensår / sår med blandet ætiologi
- Diabetiske fodsår
- Tryksår
- Sekundært helende sår, væskende sår efter laparotomi
- Maligne sår og andre kraftigt væskende sår

CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR

Superabsorberende bandage med fleksibel form

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star kombinerer fordelene ved Sorbion Sachet med flere anvendelsesområder. Med sin specielle form tillader **Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star** fleksibel anvendelse på steder som f.eks. tæer, hæle, fødder, os sacrum, bryst, armhuler, albuer eller ved dybe sår.

- Fleksibel form til alsidig anvendelse
- Høj absorption
- Høj retentionsgrad
- Kan anvendes under kompression
- Tilpasser sig kroppens konturer

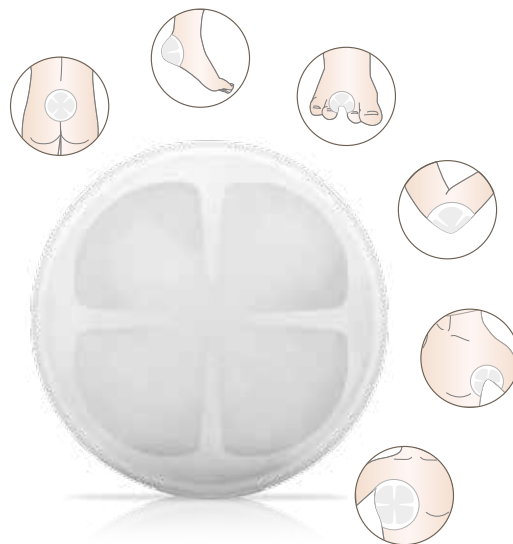

Indikationer

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

- Diabetiske fodsår
- Væskende carcinom
- Tryksår
- Venøse bensår

CUTIMED® SORBION® SACHET XL

Superabsorberende bandage til store sår

Formen og størrelsen på **Cutimed® Sorbion® Sachet XL** er specialdesignet til behandling af moderat til kraftigt væskende sår, der er vanskelige at bandagere på steder som f.eks.: Underben, os sacrum, brystkasse, lår, nedre del af abdomen.

- Øget sikkerhed ved kun en forbindelse
- Forenkler behandling af store sår
- Kan anvendes under kompression



Indikationer

Cutimed® Sorbion® Sachet XL

- Venøse bensår / sår med blandet ætiologi
- Diabetiske fodsår
- Tryksår
- Sekundært helende sår, sår efter laparotomi
- Malinge sår og andre kraftigt væskende sår

CUTIMED® SORBION® SACHET BORDER

Superabsorberende, klæbende bandage

Bruges, når der er behov for hurtig og nem påsætning

- Selvklæbende for nem påsætning
- Sikker absorption af eksudat
- Åndbar
- Kan anvendes under kompression



Indikationer

Cutimed® Sorbion® Sachet Border

- Tryksår
- Venøs bensår
- Diabetiske fodsår
- Væskende carcinom
- Postoperative sår

CUTIMED® SORBION® SACHET S DRAINAGE

Superabsorberende bandage med slids

Udviklet til brug sammen med katetre, dræn og lignende. Det slidsede design sørger for en optimal pasform ved fx. dræn.

- Hurtig og sikker absorption af sårekssudat
- Høj retentionsgrad
- God pasform



Indikationer

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage


- Anvendes ved fx. kateter og dræn

CUTIMED® SORBION® SANA

FORDELE VED DEN TREDIMENSIONELLE MEMBRAN

Cutimed® Sorbion® Sana kombinerer fordelene ved **Cutimed® Sorbion® Sachet** med en ekstra fordel i form af atraumatisk bandageskift.

Den tredimensionelle struktur minimere kontaktområdet med såret. Det betyder at **Cutimed® Sorbion® Sana** er særligt velegnet til behandling af sår, hvor et atraumatisk og smertefrit bandageskift er afgørende. **Cutimed® Sorbion® Sana** er også ideel til sår med forskellig helingsproces (**epitalisering/tørre sårområder**), inden for palliativ behandling og til patienter med smerter.

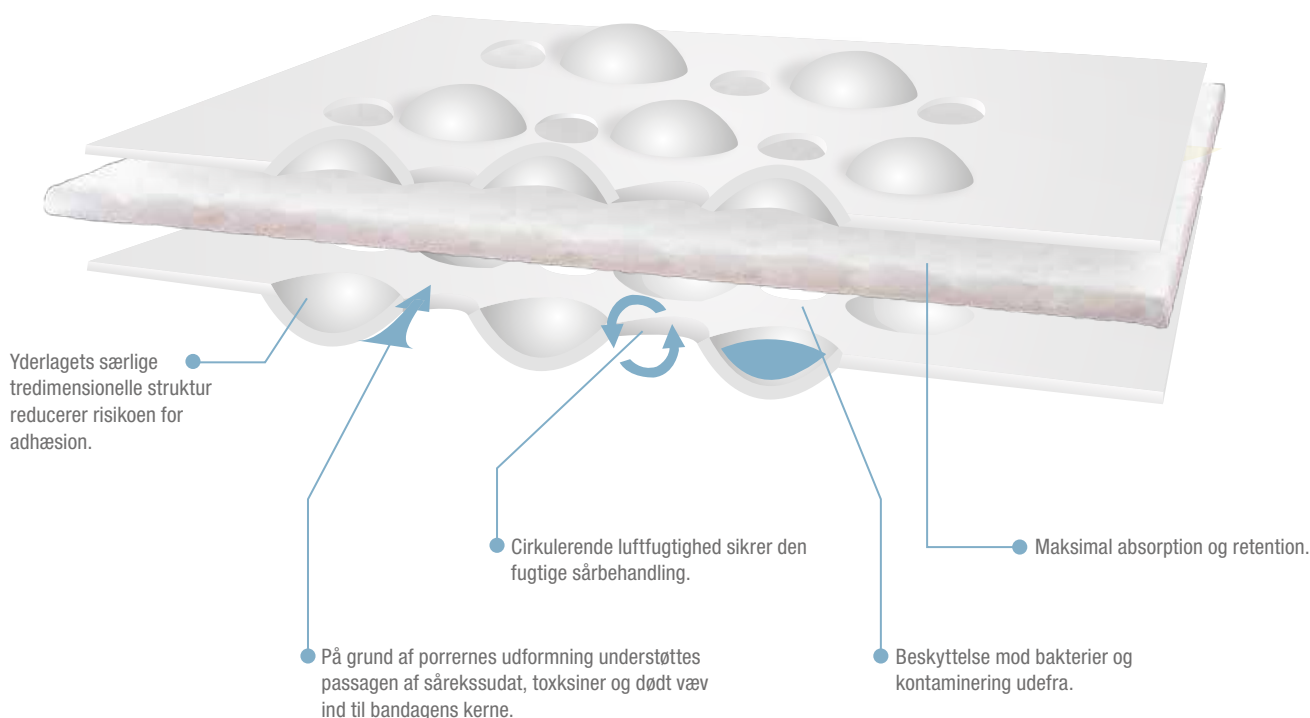

Indikationer

Serien **Cutimed® Sorbion® Sana** er atraumatiske superabsorberende bandager, som er velegnet til moderat til kraftigt væskende sår.

- Brandsår
- Venøs bensår
- Tryksår
- Diabetiske fodsår
- Traumesår
- Epidermolysis bullosa

CUTIMED® SORBION® SANA

Superabsorberende sårbandage

Den klassiske version af **Cutimed® Sorbion® Sana** er tilpasset til mange forskellige sårtyper. Den er enkel at anvende og har en høj brugerkomfort.



CUTIMED® SORBION® SANA MULTI STAR

Superabsorberende, atraumatisk bandage med fleksibel form

Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star kombinerer fordelene ved sorbion sana med flere anvendelsesområder. Den specielle form gør det muligt at anvende produktet, hvor der kræves en lidt mere fleksibel løsning som f.eks. tæer, hæle, fødder, os sacrum, bryst, armhuler, albuer eller dybe sår.



PRODUKTOVERSIGT

Bestillingsinformation – Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion® Sachet S   	Varenr.	Stk. pr. enhed
Cutimed® Sorbion® Sachet S 7.5 x 7.5 cm 3 x 3 inch	7323200 7323201 7323202	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 5 x 12 cm	7323203 7323204 7323205	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 10 x 10 cm	7323206 7323207 7323208	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 10 x 20 cm	7323209 7323210 7323211	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 15 x 15 cm	7323212 7323213 7323214	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 20 x 20 cm	7323215 7323216 7323217	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet S 20 x 30 cm	7323218 7323219 7323220	10 25 50
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA   	Varenr.	Stk. pr. enhed
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 5 x 5 cm	7323400	5
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 7.5 x 7.5 cm	7323401	5
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 10 x 10 cm	7323402	5
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 10 x 20 cm	7323403	5
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 20 x 20 cm	7323404	5
Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 20 x 30 cm	7323405	5
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star   	Varenr.	Stk. pr. enhed
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ø 8 cm	7323700 7323701	5 10
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ø 14 cm	7323702 7323703	5 10
Cutimed® Sorbion® Sachet XL   	Varenr.	Stk. pr. enhed
Cutimed® Sorbion® Sachet XL 25 x 45 cm	7324000	10

Sår dybde

-  Overfladisk
-  Dybt
-  Overfladisk + dybt

Sår fase

-  Nekrotisk
-  Inficeret
-  Fugtig nekrose
-  Granulation
-  Epitelisering

Ekssudatniveau

-  Tørt til lavt
-  Lavt til medium
-  Medium til højt
-  Højt til meget højt

Bestillingsinformation – Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion® Sachet Border 	Sårpudens størrelse	Varenr.	Stk. pr. enhed
	Cutimed® Sorbion® Sachet Border	7323600	10
	10 x 10 cm	7323601	25
	Cutimed® Sorbion® Sachet Border	7323602	10
	15 x 15 cm	7323603	25
	Cutimed® Sorbion® Sachet Border	7323604	10
	15 x 25 cm	7323605	25
Cutimed® Sorbion® Sachet S drainage 		Varenr.	Stk. pr. enhed
	Cutimed® Sorbion® Sachet S drainage	7324100	10
		7324101	25
		7324102	50
Cutimed® Sorbion® Sana 		Varenr.	Stk. pr. enhed
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323300	10
	8.5 x 8.5 cm	7323301	25
		7323302	50
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323303	10
	12 x 12 cm	7323304	25
		7323305	50
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323306	10
	12 x 22 cm	7323307	25
		7323308	50
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323309	10
	22 x 22 cm	7323310	25
		7323311	50
Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star 		Varenr.	Stk. pr. enhed
	Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star	7323800	5
	Ø 11 cm	7323801	10
	Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star	7323802	5
	Ø 17 cm	7323803	10

Produktsortiment er forskelligt fra land til land.

INTEGREREDE BEHANDLINGSLØSNINGER

BSN medical kombinerer et bredt sortiment af produkter inden for lymfologi, ortopædi og sårbehandling med en stærk teknisk ekspertise, der imødekommer markedets efterspørgsel efter mindre kompleksitet og mere effektive behandlinger. Ved konstant udvikling af **vores helhedsorienterede og integrerede behandlingsløsninger** leverer BSN medical produkter til et **sammenhængende behandlingsforløb**.

SÅRBEHANDLING/ KOMPRESSION

LYMFØDEM

KRONISK VENØS INSUFFICIENS

POSTOPERATIV SÅRBEHANDLING

ORTOPÆDI

FORSTUVNING AF FODLED

FOD- OG HÅNDELSFRAKTURER

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 33 36 35 34 · Fax: 33 36 35 31

kundeservice.dk@bsnmedical.com
www.bsnmedical.dk

