



RENGØRING

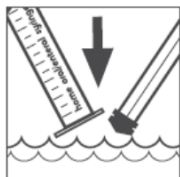

- Sprøjten rengøres straks efter brug.
- Kom sprøjten i varmt sæbevand.
- Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil


alle spor af ernæring eller medicin er væk.

- Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand .

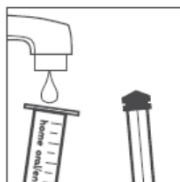

- Skyl sprøjte og stempel i rindende vand. Ryst overflødigt vand af.
- Tør med ren køkkenrulle (brug ikke viskestykke/klud).
- Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låget påsat.
- Anvend ikke rengøring i opvaskemaskine, da det forkorter levetiden af sprøjterne.
- Hvis stemplet går trægere, markeringerne bliver uklare eller sprøjten bliver beskadiget, bør den kasseres og erstattes med en ny sprøjte.


UDSKIFTES EFTER 7 DAGE

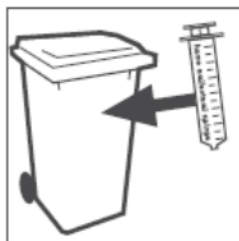


TRÆK OP OG SKYL



Til patienter med nedsat immunforsvar og til børn <1 år, anvendes sterilt vand.

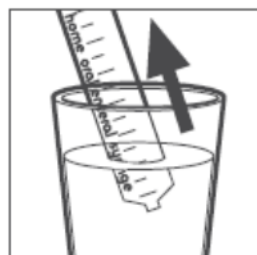

Træk postevand op eller afkølet kogt vand.

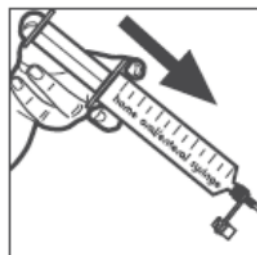

Skyl sprøjte og ernærings udstyr.