

# Avelle®

Negative pressure, positive power

**To teknologier i kombination  
kan give enestående resultater**



**Opdag hvad negativ trykterapi  
og Hydrofiber®-teknologi kan udrette sammen**




**ConvaTec**

# Det første engangssystem, der kombinerer negativ trykterapi og Hydrofiber®-teknologi til behandling af sår

## Sårbehandling med negativ trykterapi leveret i et enkelt og diskret system uden kanister:

- Brugervenligt
- Lille og transportabelt
- Støjsvagt, visuelle alarmer
- Engangspumpe med 30 dages levetid†

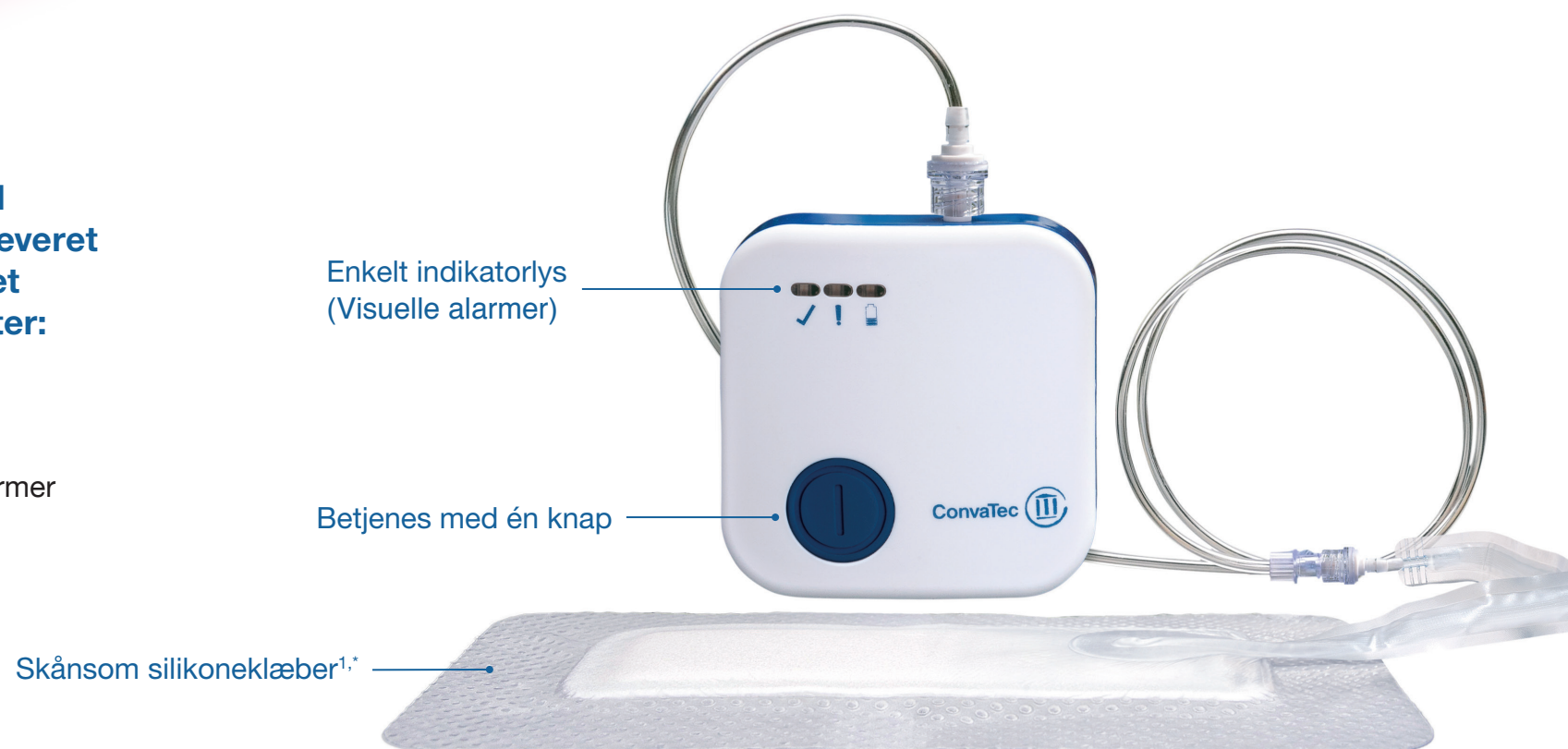


## Designet med henblik på fleksibilitet

- Velegnet til brug i og på tværs af forskellige behandlingssteder
- Pumpe og bandage kan købes separat
- Støtter patienter i at genoptage deres normale liv

## Unik Hydrofiber®-bandage til sårbehandling med negativ trykterapi (NPWT) uden kanister<sup>1,\*</sup>

- 1 Skånsom silikoneklæber<sup>1,\*</sup> sikrer, at bandagen bliver siddende
- 2 Hydrofiber® sårkontaktlaget med indsyede forstærkede fibre danner en sammenhængende gel i kontakt med sårveske og kan fjernes i ét stykke.<sup>1,\*</sup>
- 3 Hydrofiber®-kernen gelerer ved kontakt med væske og binder sårveske og de bakterier, denne indeholder.<sup>2, 3, 4\*</sup> Kanaler i Hydrofiber®-kernen er designet på en måde, der tillader væske at bevæge sig gennem bandagen og sikrer, at sårvesken effektivt bindes i bandagen.<sup>1,\*</sup>

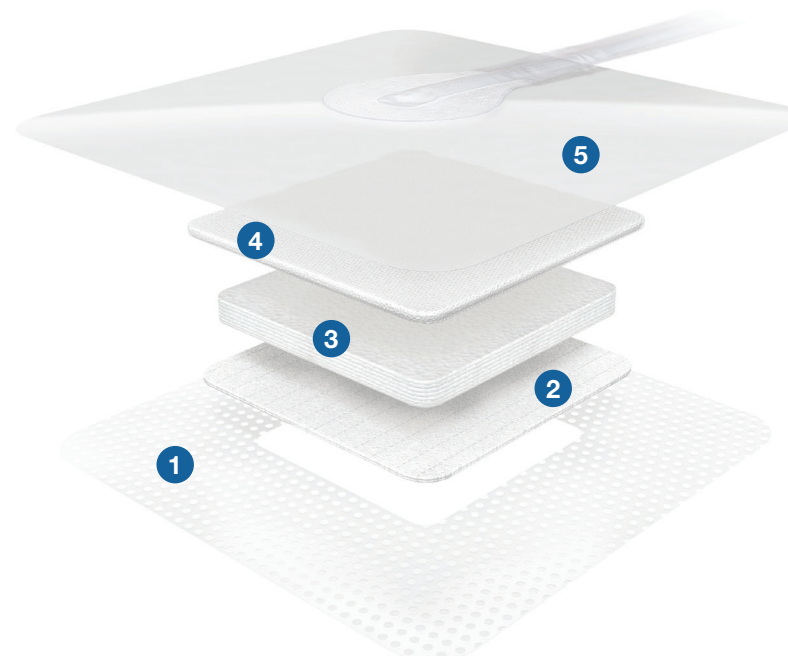


- 4 Skumlaget hjælper med at fordele undertrykket i hele bandagen.<sup>1,\*</sup>
- 5 Filmlaget udgør en barriere mod bakterier og virus, tåler brusebad og tillader sårveske at fordampe, hvilket medvirker til den samlede væskehåndtering.<sup>1,\*</sup>

\* Som demonstreret *in-vitro*.


† Det kan blive nødvendigt at skifte batteriet i pumpens levetid

## Applicere

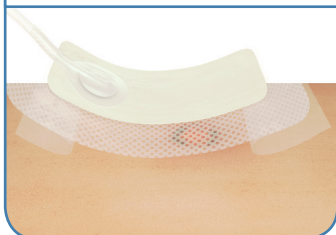

Applicér bandagen over såret, så porten er øverst (hvor det er muligt) og over intakt hud. Undgå folder, repositionér ved behov.

## Tætne

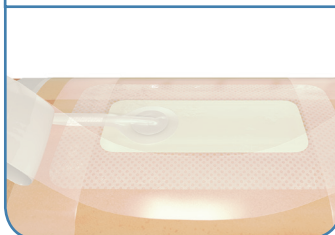

Applicér fikseringsbåndene på alle sider af bandagen med et overlap på 1 cm for at sikre en effektiv tætning af bandagen (2).

## Forbinde



Forbind pumpen, pumpe slang og bandagen forsvarligt ved at dreje koblingerne sammen.

## Starte



Tryk på den blå knap for at begynde sårbehandling med negativt tryk.

## Avelle®-systemet kan anvendes til mange forskellige typer af sår

- Kroniske sår
- Akutte sår
- Traumatiske sår
- Subakutte og rumperede sår
- Hudlapper og transplantater
- Kirurgiske incisioner

Se hele vejledningen i brugsanvisningen.

## Bestil separat pumpe og/eller bandager

| Bandagestørrelse | Antal/æske | Absorptionspudens størrelse | Varenummer |
|------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 16 cm x 16 cm    | 5          | 8 cm x 8 cm                 | 421552     |
| 16 cm x 21 cm    | 5          | 8 cm x 13 cm                | 421553     |
| 12 cm x 21 cm    | 5          | 4 cm x 13 cm                | 421554     |
| 12 cm x 31 cm    | 5          | 4 cm x 23 cm                | 421555     |
| Pumpeenhed       | 1          | N/A                         | 421551     |

1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLE® NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY DRESSING. WHRI4520 MS128. Data on file. 2015. ConvaTec.  
2. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22:903-912. 3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. Data on file. 2015. ConvaTec Inc.

Kontakt ConvaTec kundeservice på tlf.:  
48 16 74 74 for mere information

[www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)

Avelle er et varemærke tilhørende ConvaTec Inc. ©2015 ConvaTec Inc. AP-015984-MM EM WCON723.

 **ConvaTec**

ConvaTec Denmark A/S  
Skinderskovvej 32-36,  
DK-2730 Herlev  
e-mail: [convatec.danmark@convatec.com](mailto:convatec.danmark@convatec.com)