



Varenummer 1000003843

Bandage, Juzo Compression Wrap, læg, max, sort/beige, 6-xxlarge-middel

✓ Juzo Compression Wrap har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk. kan tilpasses variabelt legemsomfang.



Produktbeskrivelse

Juzo Compression Wrap er et variabelt kompressionssystem, der kan anvendes som alternativ til traditionel kompressionsbind. Her er det især vigtigt at rense såret grundigt og pålægge sårbandage før kompressionsbandagen lægges på. Juzo Compression Wrap har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk, hvilket skyldes dets uelastiske egenskaber. burrebåndslukning og gribezoner gør det nemt at lægge bandagen på, og kan tilpasses variabelt legemsomfang. Specielle indkærvinger sørger for, at der ikke dannes vinduesødemer mellem overlapningerne. Indikationer: primær og sekundær varikose, kronisk venøs insufficiens, post-trombotisk syndrom, ulcus cruris venosum og før/efter venekirurgiske indgreb. Lægsegment: to længder (normal/lang), 10 standardstørrelser, inkl. stockinette ("understrømpe"). Variabelt kompressionstryk 30-60 mmHg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Juzo
Vareserie	Compression Wrap
Features	Max, sort/beige
Ingredienser/sammensætning	88% polyamid, 12% elastan
Målepunkter	Læg
Strømpestørrelse	6-xxlarge-middel
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Før vask af produktet lukkes alle burrebåndslukninger eller fjernes hvis løs. Vask Juzo Compression Wrap mindst en gang om ugen eller oftere, hvis det er nødvendigt. Produkterne kan vaskes i vaskemaskinen ved 30°C med et mildt vaskemiddel. Produktet kan beskyttes ved at vaske det i en vaskepose. Undlad at bruge skyllemiddel. Må ikke bleges. Må ikke tørres i tørretumbler. Tørretiden kan afkortes ved at rulle dem stramt og trykke væsken ud og derefter placere dem på et tykt frothåndklæde. Placer ikke produktet på en radiator eller i solen for at tørre. Juzo Compression Wrap må ikke stryges. Rens ikke produktet med kemikalier.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	41.5 cm	28 cm	3 cm	4056403517924



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

