

# Sikrere fremgangsmåder med BD AutoShield™ Duo

Den første sikkerhedspenkanyle, der giver beskyttelse i begge kanyle ender 5mm & 8mm



Automatic  
Dual  
Protection

## 1 Forbered injektionen

1 Påsæt penkanylen



2 Tryk eventuel luft ud



3 Hold pennen i håndfladen, og hold tommelfingeren løftet



## 2 Injektionsteknik

### Teknik uden løftet hudfold

Anbefalet teknik for 5mm, med mindre der er risiko for potentiel intramuskulær injektion eller hvis der skal skabes et fast underlag (f.eks. ved blød hud) at injicere i.

Ingen løftet hudfold og injektion ved 90°



Forkert vinkel

### Teknik med løftet hudfold

Anbefalet teknik for 5mm og 8mm, med mindre der er risiko for potentiel intramuskulær injektion eller hvis der skal skabes et fast underlag (f.eks. ved blød hud) at injicere i.

Bred løftet hudfold (mindst 2,5cm hud mellem fingrene)

Injektion ved 90°



Hudfolden er ikke bred nok

Forkert vinkel

Kanylen er trængt gennem huden, når den hvide manchete berører huden. Flyt nu tommelfingeren til doseringsknappen og injicer hele dosen langsomt og forsigtigt. Hold nålen i huden i 10 sekunder efter stemplet er trykket i bund.

Bemærk: I nogle tilfælde være bedre at vælge et andet injektions område.

## 3 Automatisk dobbelt beskyttelse

Når kanylen løftes fra huden vises et **rødt indikatorbånd**, der bekræfter at sikkerhedsmekanismerne er aktiveret

Sikkerheden på penkanylens bagside bekræftes når det **orange skjold** automatisk udløses for at beskytte nålen når du fjerner fra pennen.



## 4 Sikrere bortskaffelse af kanyler

Kanylen er **beskyttet i begge ender**.

Bortskaf den brugte penkanyle i en kanyleboks.



Som alle andre BD™ Pennkanyler er den nye BD AutoShield™ Duo kompatibel med alle penne til diabetesbehandling.\*\*



BD varenr: 329605



329608



reddot design award  
honourable mention 2012



\*\*Alle erklæringer og trykt materiale er korrekte på udgivnings tidspunktet, maj 2014. Alle erklæringer udelukkende relateret til diabetes medicin og udstyr, er i øjeblikket tilgængelige i Danmark

BD, BD Logo og BD AutoShield er varemærker tilhørende Becton Dickinson and Company. © 2014 BD. CVR-nr DDDDK-71302814.

BD Medical - Diabetes Care  
BD Medical - Diabetes Care  
Herstedøstervej 27-29

Bygning A, 2.sal  
2620 Albertslund  
Tel: 43 43 45 66  
E-mail: bddenmark@europe.bd.com  
www.bd.com/europe/safety  
www.bd.com/dk/diabetes