


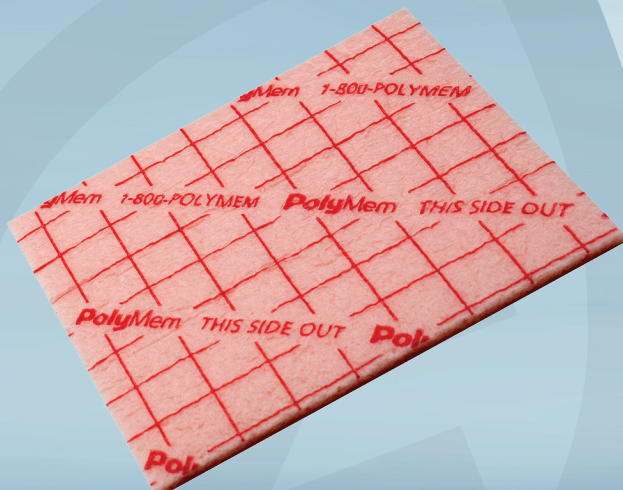

Varenummer 1000006563

Skumbandage, PolyMem, 8x8cm, standard, u/klæb, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling. Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårsmarter.

PolyMem Standard kan anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion. Er specielt velegnet initialt i sårbehandlingen med PolyMem, da såret væsker mere i starten. PolyMem Standard kan kombineres med PolyMem WIC for at forlænge skifteintervallet.

Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løsner og fjerner avitalt væv og renser sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og sikrer et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen, ligesom den har en lugtreducerende effekt. Den hydrofile polyuretan matrix sikrer en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer et kontinuerligt negativt tryk. Derved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårbunden, mikroødem i og under bandagen reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således at skaber kontakt til sårbunden. På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø.

Bør appliceres mindst 2–3 cm ud over sårkanten, og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMems effekt.

Kan klippes i. Kan sidde på i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.

Fikseres med passende sekundær fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	PolyMem
Features	Standard, u/klæb, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film
Længde/dybde	8 cm
Bredde	8 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb



Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	21.5 cm	16.5 cm	19.5 cm	
pk	15 stk	18 cm	15.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt