


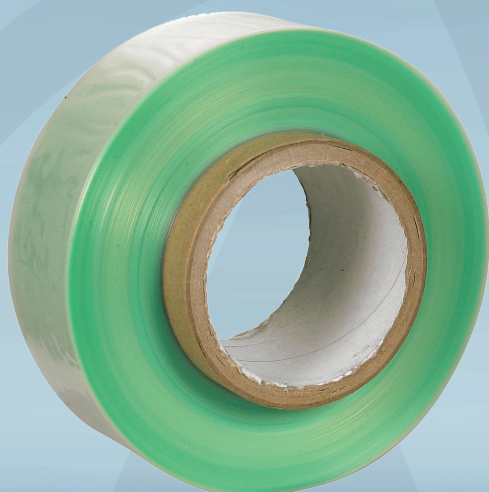

Varenummer 1000007102

**Rørfolie, Sterifol, 200m x 25cm, nylon,
til tørsterilisation****Produktbeskrivelse**

Rørfolie anvendes til indpakning af instrumenter inden sterilisation i tørsterilisator. Instrumenterne skal rengøres og desinficeres inden de pakkes i rørfolien. Rørfolien lukkes med tørsteriliseringstape eller ved hjælp af svejsemaskine. Anbefalet steriliseringstid 160^o celsius i 2 timer, tidsrummet er at regne fra den angivne temperatur i sterilisatoren er opnået. Rørfolien kan anvendes i temperatur intervallet -40°C - 180°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rørfolie
Varemærke	Sterifol
Features	Til tørsterilisation
Materiale	Nylon
Længde/dybde	200 m
Bredde	25 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17 cm	17 cm	25.5 cm	