

RENGØRING KAN GØRES SIMPELT OG EFFEKTIVT

Sekusept® MultiEnzyme

Enzymatisk for-rengøring af medicinsk udstyr inklusive fleksible endoskoper

Rengøring af kirurgiske instrumenter og endoskoper er et forstadie for en effektiv desinfektion

Den nøje valgte kombination af 4
enzymmer med overfladeaktive stoffer
og andre ingredienser giver et
fremragende slutresultat

Sekusept MultiEnzyme er et idealt
enzymatisk detergent beregnet til alle
kirurgiske instrumenter og fleksible
endoskoper

Sekusept MultiEnzyme er også:

- ▲ Materiale foreneligt ift. neutral pH
værdi
- ▲ Tidsbesparende da man undgår
genbehandling
- ▲ Økonomisk i brug ved lav dosering



Sekusept® MultiEnzyme

Enzymatisk for-rengøring af medicinsk udstyr inklusive fleksible endoskoper

Hvorfor Sekusept MultiEnzyme?

HURTIG

Sekusept MultiEnzyme giver et effektivt og grundigt resultat, som hjælper med at reducere tid i rengøringen og dermed undgå genbehandling.

SIKKER

Sekusept MultiEnzyme kan anvendes i en stor variation af instrumenter samt fleksible endoskoper. Med den neutrale pH værdi er produktet sikkert og nemt at bruge.

SIMPEL

Sekusept MultiEnzyme er en unik kombination af overfladestoffer såsom Protease, lipase og amylase enzymer, som hjælper med at nedbryde protein fedt.

Den lavt skummende formulering understøtter en enkel afskylning

Den transparente blå farve indikerer om produktet er doseret.

Økonomi

ØKONOMISK

Sekusept MultiEnzyme er et idealt enzymatisk detergent beregnet til alle kirurgiske instrumenter og fleksible endoskoper

Sekusept MultiEnzyme kan anvendes i lav koncentration - 0,3% (3ml) / 2% (20ml) / liter.

Dette betyder mindre forbrug pr. cyklus.



Sekusept MultiEnzyme
2L Flaske

Sekusept MultiEnzyme
6L dunk

ECOLAB Aps

Høffdingsvej 36 2500 Valby,
Danmark Tel : +45 36 15 85 85
www.dk@ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

www.de.ecolab.eu



FAST.
SAFE.
SIMPLE.

ANVENDELSESOMRÅDER

Til manuel rengøring eller for rengøring af kirurgiske instrumenter herunder fleksible endoskoper og tilbehør, f.eks. kirurgiske instrumenter og stive endoskoper, MIC - instrumenter.

ANVENDELSE

Afhængigt af type og grad af snavs opretter du en opløsning på 0,3% (3 ml / L) - 2% (20 ml / L) rent vand fra hanen. Ilæg instrumenter, og vær sikker på, at alle overflader er helt dækket. Rengør emnerne i henhold til instrumentfabrikantens instruktion, herunder mekanisk handling (f.eks. : børstning, aftørring), indtil det er synligt rent. Hvis produktet bruges i ultralydsbad, skal låget være lukket under hele processen. Skyl med vand af minimum drikkevandskvalitet og tør de ydre overflader og indre kanaler (f.eks. endoskoper) efterfølgende. Derudover anbefaler vi vores produkt Sekusept aktiv til den manuelle proces eller SolidSafe-systemet til automatisk genbehandling af instrumenter. Kontakt venligst din Ecolab-repræsentant for yderligere information. Til automatiserede processer med fleksible endoskoper anvendes de dedikerede produkter til disse processer, f.eks. Olympus produkter.

INDHOLDSSTOFFER

Proteaser, amylaser, lipaser, overfladeaktive stoffer, korrosionshæmmere, opløsningsmidler, hjælpemidler, emulgatorer

FORPAKNING OG ORDREINFORMATION

Produkt	Størrelse Indhold	Varenr.
Sekusept MultiEnzyme P Flaske	4 x 2 Liter	3046650
Sekusept MultiEnzyme P Dunk	6 Liter	3046670
Sekusept MultiEnzyme Flaske	4 x 2 Liter	3046620
Sekusept MultiEnzyme Dunk	6 Liter	3046640

OPBEVARING

I original dunk ikke over 25 grader C
Kun til professionelt brug