



Produktdatablad

Polymermembran, u/klæbekant, u/klæbende kontaktlag, m/sølv steril, 20 x 20 cm

Varenummer: 1000007602



Varedeklaration

5 stk = 1 pakke. Produktbetegnelse: Skumbandage. Varemærke: PolyMem. Vareserie: MAX Silver. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: PUR-skum, PUR-film, F68 surfactant, glycerin, co-polymer stivelse, nanokrystalliseret sølv

. Features: u/klæbende kontaktlag og u/klæb, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 20 cm. Bredde: 20 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte. Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårvæske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølv. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn. In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder. PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sårbandager uden sølv. PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet. Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår. PolyMem MAX Silver vælges og anvendes efter samme principper som PolyMem MAX uden sølv. Velegnet til sår med moderat til kraftig sekretion, og i særdeleshed initialt i sårbehandlingen med PolyMem. Bør appliceres mindst 2-3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMem's effekt. Fikseres med passende fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten. Kan tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det. . Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: PolyMem bandagerne må ikke anvendes sammen med hypokloridopløsninger (kloramin). Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.