



Cavilon™

Skin Care Solutions

Påføring af 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Til forebyggelse og behandling af inkontinensrelateret dermatitis (IAD)



Hvordan påføres 3M™ Cavityl™ Advanced hudbeskyttelse

Til forebyggelse og behandling af inkontinensrelateret dermatitis (IAD)

Materialer som behøves:

- ▶ 3M™ Cavityl™
Vaskeservietter til badning
og vask af kroppen eller
rent vand
- ▶ Blød vaskeklud, som ikke
fnulrer
- ▶ 3M™ Cavityl™ Advanced
hudbeskyttelse
- ▶ Handsker

Forbered materialerne



Læg materialerne på en ren overflade



Åben pakningen med Cavityl Advanced hudbeskyttelse og lad applikatoren blive i plastposen.

Placer og vask patienten



Placer patienten (eksponér den hud som skal vaskes, men hold patienten dækket mest muligt, for varme og integritet).



Rengør huden grundigt og forsigtigt med et pH-balanceret rengøringsmiddel, f.eks. 3M™ Cavityl™ Vaskeservietter til badning og vask af kroppen eller rent vand.
Tør forsigtig området af på intakt hud efter behov.

Hvis der er områder med skadet hud, kan eventuel sårvæske tørres af med en kompres.

Skift handsker



Skift handsker.

Hver applikator dækker et område svarende til et A4-papir.

Det kan være nødvendigt at anvende mere end én applikator, for at dække større områder.

Se produktdatablad for yderligere information om kontraindikationer, forsigtighed og advarsler.

Påføring af 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse



Tag fat i applikatoren og placér din tommelfinger på enden af grebet.

Hold applikatorens skumsvamp nedad og tryk på grebet for at bryde den indre ampul.

Du vil høre en smældende eller poppende lyd, når ampullen brydes.

Derefter er det ikke nødvendigt at trykke på grebet.



Hold applikatoren nedad i ca. 10 sekunder for at væsken kan løbe ned i skumsvampen.

Væsken løber nedad via tyngdekraften, så du behøver ikke at bibeholde tryk på grebet.


Væsken vil ikke gennemvæde hele svampen i yderkanterne.



Påfør Cavilon Advanced hudbeskyttelse ved forsigtigt at føre skumsvampen over det pågældende område og den omkringliggende hud.

Anvend en jævn, strygende bevægelse med minimal overlappning af produktet. Applikatoren kan anvendes i alle retninger.

Det er ikke nødvendigt at trykke yderligere ned på applikatoren under påføring, da dette kan resultere i unødigt gennemvædning og ansamling af væske.

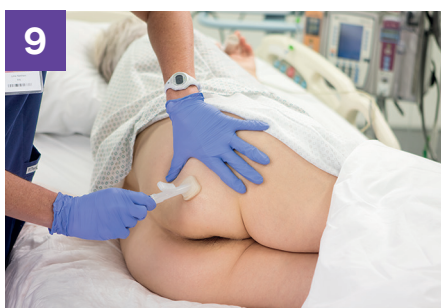

Fortsæt påføringen til hele området, som skal behandles, er dækket. Det er vigtigt at påføre produktet på hele den hud, der er udsat for fæces og/eller urin.



Lad området tørre mindst 30 sekunder. Hvis der mangler et område, ventes der til væsken er fuldstændig tør inden næste påføring.



Hvis Cavilon Advanced hudbeskyttelse påføres i en hudfold eller andre områder med hud-til-hud kontakt, sørges for, at holde hudfladerne adskilte, så væsken kan tørre helt (mindst 30 sekunder), inden huden kommer tilbage til normal position.

Yderligere information



Re-appliquer produktet 2 gange om ugen.

Cavilon Advanced hudbeskyttelse er vandtæt og fjernes ikke ved almindelig vask. Hyppigere påføring kan resultere i, at der bygges et ekstra lag af produktet.



Lad Cavilon Advanced hudbeskyttelse tørre i mindst 60 sekunder før påføring af en klæbende forbindelse.

Filmen vil slides af og behøver ikke at fjernes. Hvis du gerne vil fjerne produktet, anvendes et klæbefjernemiddel som indeholder hexametyldisiloxan (HMDS) eller silikonepolymer.

Det anbefales at anvende klæbefjernemiddel med HMDS eller silikonepolymer hver gang du fjerner en klæbende forbindelse eller tape fra et område, som er dækket med Cavilon Advanced hudbeskyttelse.

Opdag hvordan 3M™ Caviion™ Advanced hudbeskyttelse kan give dig mulighed for at forebygge og behandle IAD.

For yderligere information, besøg 3M.co.uk/EndIAD eller kontakt din lokale produktspecialist.

Bestillingsinformation

3M™ Caviion™ Advanced hudbeskyttelse

3M Varenr.:	Størrelse	Stk./æske
5050G	2,7 ml applikator	20



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tel 43 48 0100
www.3m.com/dk

Caviion er registreret varemærke af 3M Company.
Genbrug venligst. Trykt i Danmark. ©3M 2017. Alle
rettigheder forbeholdes. BR531150-1DK170529.