

Sår- og Øjenskyllespray

0,9 % natriumchloridopløsning

Hurtig førstehjælp lige ved hånden
- til både hud og øjne!

Med den nye Plum Sår- og Øjenskyllespray får du øjeblikkelig og effektiv pleje til mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Den hjælper dig med at minimere risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse.

Sår- og øjenskyllesprayeren er baseret på saltvand. Den blide spray giver en jævn og afbalanceret skylning, som er kraftig nok til at skylle skidt og snavs fra et sår og samtidig så blid, at den er behagelig at skylle øjet med. Den er nem at tage med, let at bruge og kan anvendes i alle vinkler.

Ideel til kørende håndværkere, den industrielle sektor, produktionsvirksomheder, laboratorier etc.

Blid og effektiv
spray til sårrens
og øjenskyll



PLUM SÅR- OG ØJENSKYLLESPRAY

Varenr.: 45530
Forpackningsstr.: 24 x 50 ml

Varenr.: 4554
Forpackningsstr.: 12 x 250 ml


Mål:
50 ml: H: 132 x Ø: 34 mm
250 ml: H: 240 x Ø: 52 mm



Vægbeslag 250 ml
Varenr.: 4123
Forpackningsstr.: 24 stk.

KLARE FORDELE:

- Kan hurtigt og nemt anvendes med blot én hånd
- Sikker, præcis og effektiv skylning
- Støvhætten beskytter dysen mod forurening
- Let at transportere; Klassificeret som ikke-brændbar aerosol
- Allergivenlig
- Steril opløsning uden konserveringsmidler
- Holdbarhed: 3 år. Udløbsdato fremgår af dåsens bund

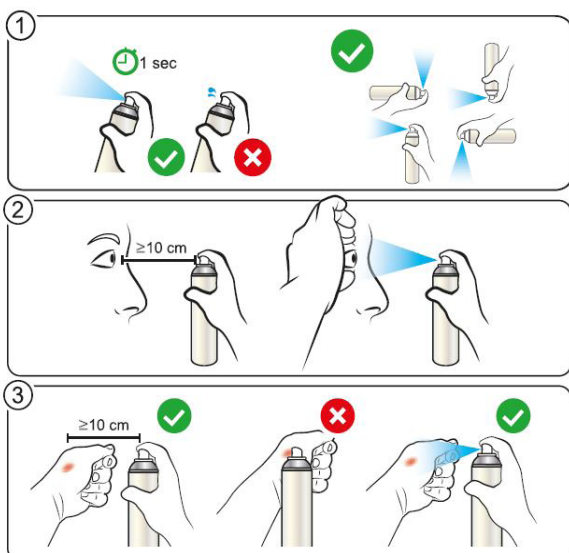

ANVENDELSE:

- Sprayeren kan anvendes flere gange, og indholdet forbliver sterilt, indtil beholderen er tom
- Rens dysen før brug ved kortvarigt at spraye ud i luften
- Placer dysen ca. 10 cm fra såret eller øjet
- Tryk på dysen og skyl sår eller øje
- Lad ikke dysen komme i berøring med hverken sår eller øje
- Må ikke anvendes hvis dysen er tilstoppet

Plum Sår og Øjenskyllespray er CE-mærket jf. retningslinjerne i "Guidelines for Classification of Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC)"

Plum A/S

Frederik Plums Vej 2 • DK-5610 Assens • Telefon +45 6471 2112 • info@plum.dk • www.plum.dk

plum