



Produktdatablad

Skumbandage, PolyMem WIC, 8x8cm

Varenummer: 1000009143



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Skumbandage. Varemærke: PolyMem. Vareserie: WIC. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: polyuretan matrix, surfaktant, glycerin, co-polymer stivelse. Features: til kaviteter, uden klæb, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 8 cm. Bredde: 8 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling. Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårmerter. PolyMem WIC er en kavitetsbandage, der kan anvendes i kaviteter, hvor man kan se sårbunden, samt som sårkontaktlag ved meget væskende sår. Har ingen bagsidefilm, og transporterer ekssudat videre til sekundær bandage. Denne bør være PolyMem MAX, alternativt en superabsorberende bandage ex. Curea P1. PolyMem WIC kan anvendes til alle sår i alle faser med let til kraftig sekretion. Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løsner og fjerner avitalt væv og renses sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og sikrer et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen, ligesom den har en lugtreducerende effekt. Den hydrofile polyuretan matrix sikrer en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer et kontinuerligt negativt tryk. Derved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårbunden, mikroødem i og under bandagen reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således at skaber kontakt til sårbunden. Det er derfor vigtigt kun at fylde 2/3 af kaviteten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMems effekt. Kan klippes i. Kan ligge i flere lag og i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det. Fikseres med sekundær bandage. . Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.