

Curea P1 DUO Active®

Superabsorberende kulbandage



curea medical

Innovation in Care



Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og binde-midler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

Integreret lag af aktivt kul virker dekontaminerende og reducerer lugtgener – selv ved meget ildelugtende sår.

Absorption fra begge sider.



Curea P1 DUO Active - funktion & fordele:

- Lag af aktivt kul til dekontaminering og endnu kraftigere reduktion af lugt – fremmer livskvalitet.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt – reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekomfort.

Curea P1 DUO Active - indikationer & anvendelse:


- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Inficerede og ildelugtende sår.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Ved applicering med grå side mod såret: øget mikrobiel og endotoksisk dekontaminering, samt reduktion af lugt.
- Ved applicering med hvid side mod såret: kraftig reduktion af lugt.
- Kan kombineres med kavitetbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Fikseres med film henover hele bandagen for åndbar, væsketæt barriere.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.



Bemærk!

Der må ikke klippes i bandagen.

Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

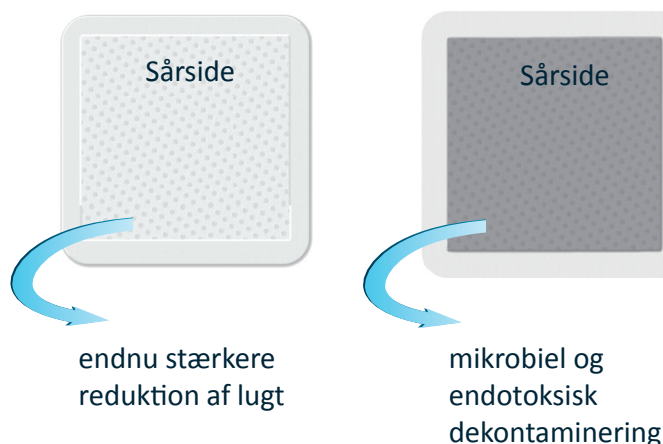

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
C1DUO-055075-10	Curea P1 DUO Active	5,5 x 7,5 cm	3,5 x 5,5 cm	10
C1DUO-100100-10	Curea P1 DUO Active	10 x 10 cm	9 x 9 cm	10
C1DUO-100200-10	Curea P1 DUO Active	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10
C1DUO-200200-10	Curea P1 DUO Active	20 x 20 cm	18 x 18 cm	10
C1DUO-200300-10	Curea P1 DUO Active	20 x 30 cm	18 x 28 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk