



People.Health.Care.

Debrisoft® Pad

DEN gyldne standard for
mekanisk debridering.



Debrisoft® Pad
DEN gyldne standard

2 størrelser,
flere muligheder

EFFEKTIV som altid!

Debrisoft®
garanterer

Dine
fordele



Synlige
resultater
hurtigt¹

Du sparer
tid og penge

Rensning af såret
på 2 - 4 minutter



Let at anvende¹
og omgående
resultater

Fugt, rens,
og det er det!

95 % god til
fremragende

Brugertest



Praktisk talt
smertefri
ved brug¹

Øget patient
accept

97,4 % uden smerter
eller bivirkninger

Brugertest

En applikation med
1 x Debrisoft Pad

En applikation med
2 x Debrisoft Pad


Før Debrisoft²

Efter Debrisoft²



Før Debrisoft³

Efter Debrisoft³

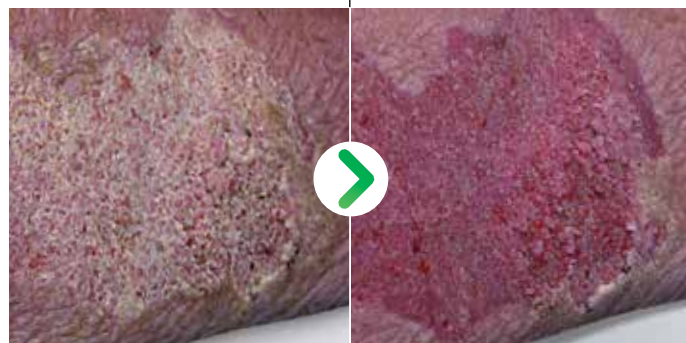

Yderst hurtige, effektive resultater.



Debrisoft® Pad
I en klasse for sig selv.

Det er **DEBRISOFT® PAD**

Den gyldne standard med god grund:

De patenterede monofilamentfibre, der udgør Debrisoft Pad, løsner effektivt sår debris og eksudat fra såret og binder dem til den tykke fibersammensætning, hvorved de fjernes effektivt, men nænsomt fra såret. Debrisoft Pad fjerner endda op til 99,9 %* biofilm.

Debridering med Debrisoft® Pad – det betyder:

Yderst effektiv, men nænsom rensning af praktisk talt alle overfladiske sår.

Flap på bagsiden

 Forbedret kontrol

Skrå fiberspidser

 Yderst effektive resultater

Syet kant + forstærket bagside

 Simpelt anvendelse

Blød fibersammensætning med millioner af fibre

 Skånsom anvendelse



Debrisoft® Pad

Til den kompromisløse debridering.

* For en succesfuld håndtering af biofilm; antimikrobiel behandling kræves, efter at såret er rensset med Debrisoft.

ENKELT for alle!

Sådan bruges den:


1. Fugt

Debrisoft Pad renser kun effektivt, hvis den fugtes forinden! Debrisoft kan fugtes med alt fra vand fra hanen til antimikrobielle sårrensingsopløsninger. Hvad der end vælges, skal lokale retningslinjer følges.



2. Rens

Med et let tryk renses såret med den bløde fiberside. Rens om nødvendigt huden omkring såret med endnu en fugtet Debrisoft Pad.

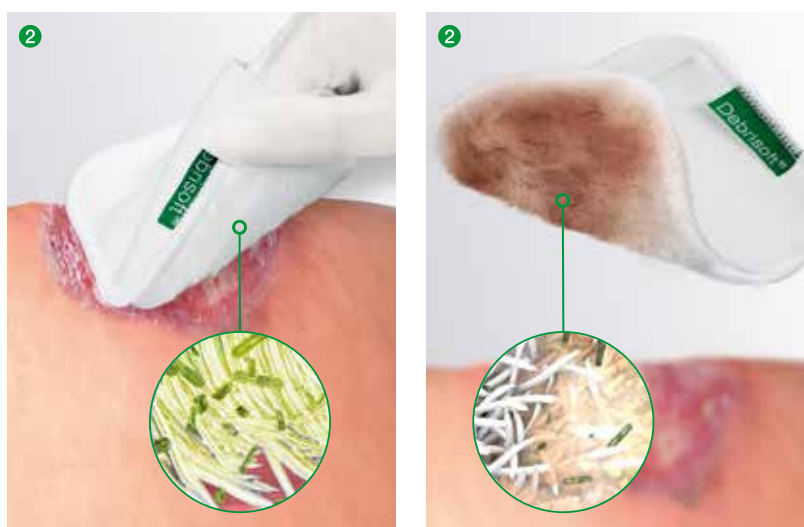

3. Og det er det!

Bortskaf den brugte Debrisoft Pad. Overhold altid de lokale retningslinjer for bortskaffelse.



Debrisoft® Pad

Fugt, rens, og det er det!

Det **ALSIDIGE GENI**

Den tre-delte løsning, som er lige så simpel som den er god: Debrisoft®

Lige meget om der er tale om overfladiske eller dybe sår, så kan du med Debrisofts sortiment være sikker på altid at have det rigtige produkt til sårrensning ved hånden.

! **Prøv Debrisoft Pad på tør, pergamentagtig, hyperkeratotisk, seborroisk eller fedtet hud.**

Debrisoft® Lolly

Til dybe eller overfladiske sår

Debrisoft® Pad
13 x 20 cm / 10 x 10 cm

Til overfladiske sår



Debrisoft®

Debridering når det er bedst.



People.Health.Care.

Kilder:

1) Bahr S, Mustafi N, Hättig P, Piatkowski A, Mosti G, Reimann K, Abel M, Dini V, Restelli J, Babadagi-Hardt Z, Abbritti F, Eberlein T, Wild T, Bandl K, Schmitz M. Clinical efficacy of a new monofilament fibre-containing wound debridement product. Journal of Wound Care (2011) 20 (5): 242–248
(Tysk oversættelse i: Wundmanagement (2011) 5: 260–266)

2) Illustrationer: Barbara Pritchard, Wrexham Maelor Hospital, Wales, UK
3) Illustrationer: Gabriele Stern, ATZ-Stern, Bocholt, Tyskland

Bestillingsinformation

Debrisoft® Pad til debridering

steril, enkeltvist pakket

Str. (cm)	REF	VE (stk.)
10 x 10	34 321	5/50
13 x 20	34 323	5/50

NY

