




Varenummer 1000011768

Agarplade, Müller Hinton, kølevare, steril

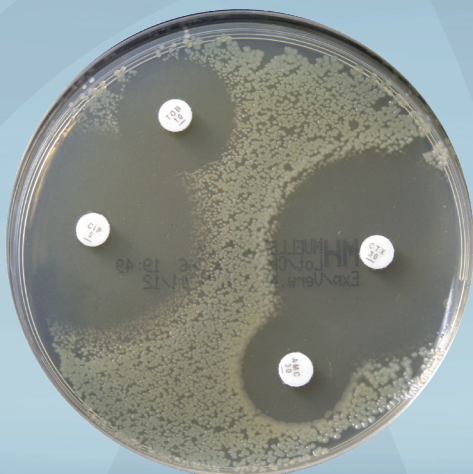

Produktbeskrivelse

Skal udstryges, helst med en Drigalskispattel, Max 1 – 2 dråber urin. Man kan også benytte en steril vatpind hvor vattet på spidsen er "gennemvædet i urin". Herefter "onkulerer" man vatpinden ud først den ene vej, og så drejer man agarpladen og onkulerer (Poder agaren)n den anden vej. Ifald man hælder urin på agaren vil resistenscirklerne have en tendens til at blive for store, og tabsene falder lettere af endvidere kan man med fordel sætte agarpladen ind på hovedet i varmeskabet da det minimerer risikoen for eventuel "kodensvand". Agarplader skal altid placeres på en hylde i varmeskabet. Sætte de direkte i bunden på selve varmepladen bliver temperaturen oftest for høj, hvilket kan "dræbe" visse bakterie stammer, så agarpladen fremstår ren, selv om den i princippet kan være inficeret.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Agarplade
Varemærke	Müller Hinton
Features	Kølevare, steril
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +12° C, dog valideret til 48 timer uden køl under transport. Hvis de opbevaring over +2° C til +12° C, altså rumtemperatur, så er holdbarheden 4 uger.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	19 cm	9 cm	6.5 cm	5032384128815
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.

STERILE

Produktet er sterilt