




Varenummer 1000011768

Agarplade, Müller Hinton, kølevare

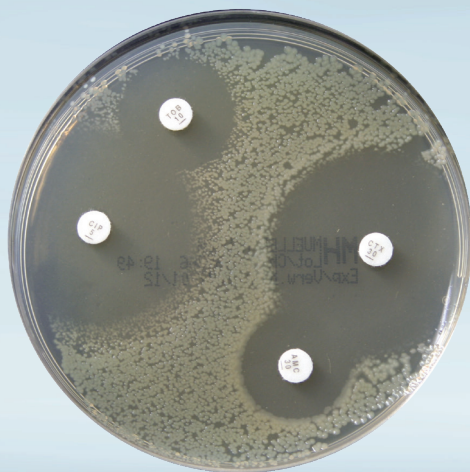

Produktbeskrivelse

Skal udstryges, helst med en Drigalskispattel, Max 1 – 2 dråber urin. Man kan også benytte en steril vatpind hvor vattet på spidsen er "gennemvædet i urin". Herefter "onkulerer" man vatpinden ud først den ene vej, og så drejer man agarpladen og onkulerer (Poder agaren)n den anden vej. Ifald man hælder urin på agaren vil resistenscirklerne have en tendens til at blive for store, og tabsene falder lettere af endvidere kan man med fordel sætte agarpladen ind på hovedet i varmeskabet da det minimerer risikoen for eventuel "kodensvand". Agarplader skal altid placeres på en hylde i varmeskabet. De må ikke sættes direkte i bunden på selve varmepladen i varmeskabet, da temperaturen vil blive for høj, hvilket kan "dræbe" visse bakterie stammer, så agarpladen fremstår ren, selv om den i princippet kan være inficeret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Agarplade
Varemærke	Müller Hinton
Features	Kølevare
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Ved opbevaring på køl +2 til +12 grader er holdbarheden i henhold til udløbsdatoen på varen - dog valideret til 48 timer uden køl under transport. Ved opbevaring mellem +12 til +25 grader, altså rumtemperatur, er holdbarheden 4 uger. Er kølekæden brudt pga. opbevaring ved stuetemperatur i klinikken, er udløbsdatoen reduceret til 4 uger fra opbevaring ved stuetemperatur eller til udløbsdatoen hvis den kommer før.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	19 cm	9 cm	6.5 cm	5032384128815
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.