



Varenummer 1000012710

ABENA®


## Bodystocking, ABENA, M, hvid, lynlås i benudskæring og skulderson, seamless

- ✓ Blød, åndbar bodystocking til fiksering af bind/ble
- ✓ Fleksibelt og strækbart materiale til en tæt pasform, der holder bindet/bleen på plads
- ✓ Ingen sømme, der giver trykmærker og hudirritation
- ✓ Lynlåse i skridt og skulder gør den let at bruge og justere
- ✓ Enkeltpakket



### Produktbeskrivelse

Bodystocking i tekstil til fiksering af en ble/bind – bæres som helkropsundertøj. Abri-Fix Bodystocking er en blød og fleksibel bodystocking i bomuld med ærmer og ben. Bomuldsstoffet sikrer, at huden holdes tør, og brugerne veltilpas. Den sømløse striketechnologi – et innovativt koncept til fremstilling af tøj næsten uden sømme – forhindrer trykmærker og hudirritation. Der er lynlåse i ben-, skridt- og skulderområdet, hvilket gør den nem at bruge og justere. Lynlåsen er dækket, så huden beskyttes mod irritation. Størrelse og vaskeanvisning er angivet på mærke i tøjet. 75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan

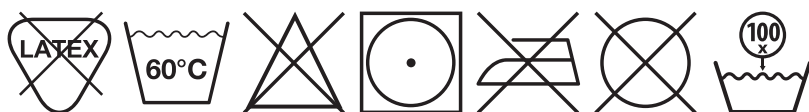

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bodystocking
Varemærke	ABENA
Størrelse	M
Farve	Hvid
Features	Lynlås i benudskæring og skulderson, seamless
Materiale	Bomuld, elastan, PA
Ingredienser/sammensætning	75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan
Hoftevidde	85-110 cm
Køn	Unisex
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 90° C, men den bedste holdbarhed opnås ved vask ved 60° C. Tørretumbles på let niveau. Tåler vask op til 80 gange. Luk lynlåse inden vask og læg lynlås skyderen således, at den er helt dækket af stoffet for enden af lynlåsen. Krymp ca. 8%. Ved brug af vaskepose forlænges produktets levetid. Brug af skyllemiddel anbefales ikke.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Bodystocking i tekstil til fiksering af bind/ble - bæres som almindeligt undertøj. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse ud fra hoftmål for at sikre, at den er behagelig at bruge.

Bodystocking kan åbnes helt (både i skridt- og skulderlynlåse), hvilket gør den let at bruge og justere. Juster, og sørg for, at bodystocking sid-

der korrekt, før lynlåse lukkes, for at forhindre skade på brugeren eller produktet.

Kan vaskes ved op til 90° C, men den bedste holdbarhed opnås ved vask ved 60° C. Luk lynlåse inden vask og læg lynlåsskyderen således, at den er helt dækket af stoffet for enden af lynlåsen. Udsæt ikke produktet for tryk som f.eks. presning eller glatning, da dette kan beskadige lynlåsene

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 stk	40.1 cm	28.4 cm	24.1 cm	5703538390135
stk	1 stk				5703538390128



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.



Produktet må ikke stryges.



Produktet må ikke kemisk renses.



Produktet kan vaskes op til 100 gange.