



Varenummer 1000012980

QuikRead Transportbox, blå, m/ transportpropper

Produktbeskrivelse

QuikRead transportbox kan bruges til opbevaring af patientprøver foretaget med QuikRead crp-reagenskit inden analyse på QuikRead Go instrumentet. Prøven kan holde sig i op til 2 timer fra prøvetagning til analysering ved stue temp. (18-25 grader) De røde transportpropper bruges til transport af kuvetterne, hvor tiden mellem prøvetagning og analyse overstiger 15 min. Reagenspropper må ikke bruges ved transport af kuvetterne ved transport tid over 15 min. Hvis transportpropperne skal genbruges bør de rengøres mellem hver brug med sæbevand og herefter aftørres eller skylles med 70% ethanol/isopropanol.

Specifikationer

Produktbetegnelse	QuikRead Transportbox
Farve	Blå
Features	M/ transportpropper

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20 cm	10 cm	8 cm	

