


# Curea P1 DUO®

## Superabsorberende bandage



**curea medical**

Innovation in Care

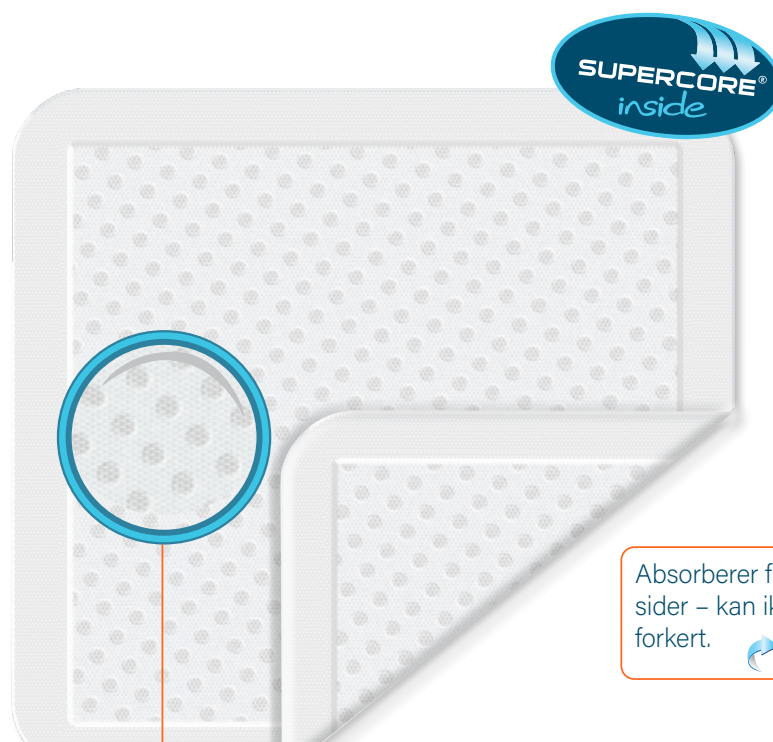

Absorberer fra begge sider – kan ikke vendes forkert.



Et meget gennemtrængeligt non-woven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

### Curea P1 DUO - funktion & fordele:


- Sårkontaktlag på begge sider – kan appliceres med begge sider mod såret – enkel i brug.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekomfort.

## Curea P1 DUO - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Særdeles velegnet ved væskende hud mod hud kontakt / intertrigo.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Fikseres med film for åndbar, væsketæt barriere.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

## Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

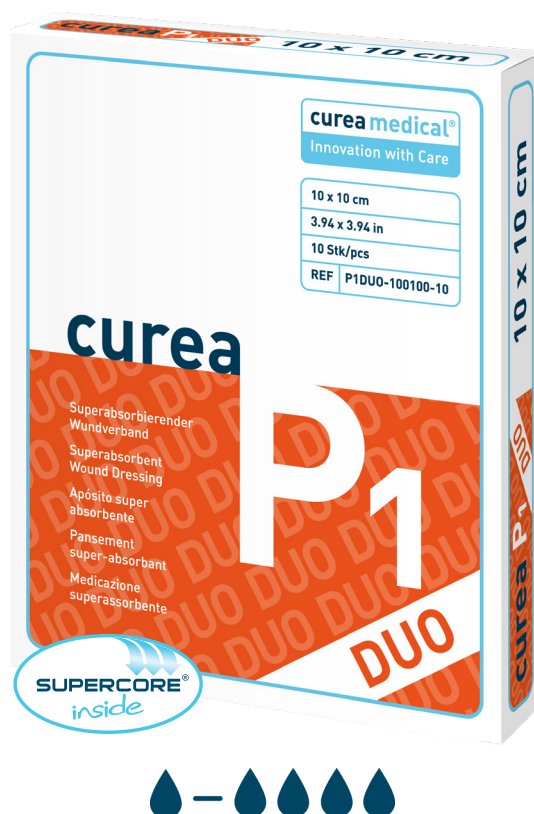

| Varenr.         | Beskrivelse  | Størrelse    | Størrelse på sugende midte | Antal pr. æske |
|-----------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|
| P1DUO-055250-10 | Curea P1 DUO | 5,5 x 25 cm  | 3,5 x 23 cm                | 10             |
| P1DUO-075075-10 | Curea P1 DUO | 7,5 x 7,5 cm | 6,5 x 6,5 cm               | 10             |
| P1DUO-100100-10 | Curea P1 DUO | 10 x 10 cm   | 9 x 9 cm                   | 10             |
| P1DUO-100200-10 | Curea P1 DUO | 10 x 20 cm   | 8 x 18 cm                  | 10             |
| P1DUO-200200-10 | Curea P1 DUO | 20 x 20 cm   | 18 x 18 cm                 | 10             |
| P1DUO-200300-10 | Curea P1 DUO | 20 x 30 cm   | 18 x 28 cm                 | 10             |

Steril og enkeltpakket  
Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:  
Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)