


Curea P1 DUO®

Superabsorberende bandage



curea medical

Innovation in Care

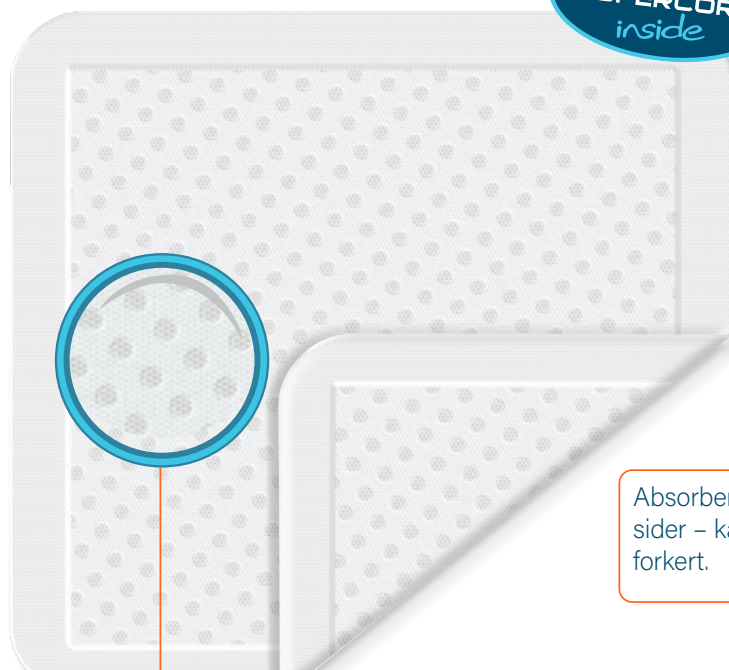

Et meget gennemtrængeligt non-woven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

Absorberer fra begge sider – kan ikke vendes forkert.



Curea P1 DUO - funktion & fordele:


- Sårkontaktlag på begge sider – kan appliceres med begge sider mod såret – enkel i brug.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekomfort.

Curea P1 DUO - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Særdeles velegnet ved væskende hud mod hud kontakt / intertrigo.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Fikseres med film for åndbar, væsketæt barriere.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

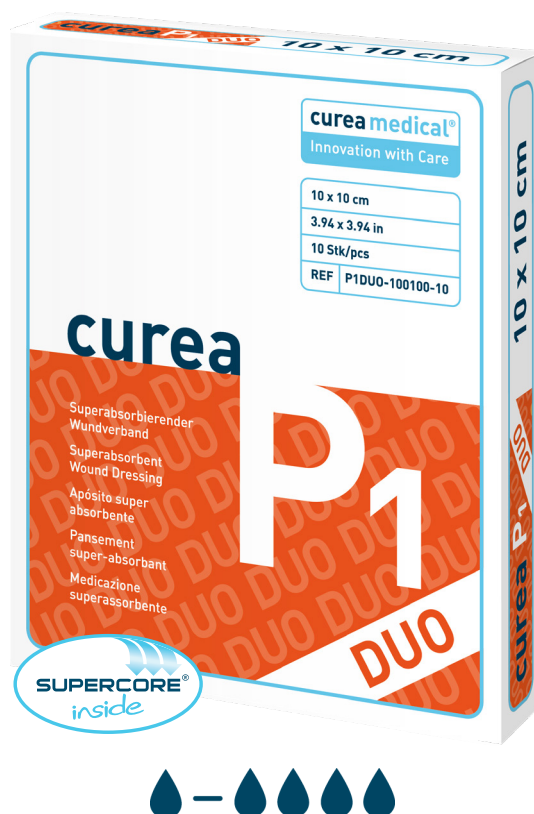

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P1DUO-055250-10	Curea P1 DUO	5,5 x 25 cm	3,5 x 23 cm	10
P1DUO-075075-10	Curea P1 DUO	7,5 x 7,5 cm	6,5 x 6,5 cm	10
P1DUO-100100-10	Curea P1 DUO	10 x 10 cm	9 x 9 cm	10
P1DUO-100200-10	Curea P1 DUO	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10
P1DUO-200200-10	Curea P1 DUO	20 x 20 cm	18 x 18 cm	10
P1DUO-200300-10	Curea P1 DUO	20 x 30 cm	18 x 28 cm	10

Steril og enkeltpakket
Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk