



Klargøring til analyse

AFINION™ Lipid Panel testkassette

- Opbevar testkittet i køleskab (2-8°C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25°C) i højst 14 dage.
- Testkassetten skal have en temperatur på 18-30°C før brug; lad den uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i ca. 15 minutter.
- Åbn folieposen umiddelbart inden brug. Undgå direkte sollys.
- Hold testkassetten i håndtaget, vend bunden i vejret på den én gang, og vend den om igen til normal position før brug.

Patientprøve

- Kapillærblod direkte fra fingeren.
- Venøst fuldblod (med EDTA eller Heparin), serum eller plasma.
- Kapillærblod kan ikke opbevares. Venøst fuldblod tilsat antikoagulanter (EDTA eller Heparin) kan opbevares i op til 4 timer ved stuetemperatur (15-25°C) eller i køleskab (2-8°C) i 4 dage. Serum og plasma kan opbevares i køleskab i 10 dage.

AFINION™ Lipid Panel Kontrol

- Opbevar kontroller i køleskab (2-8°C). Åbne kontroller er stabile i 8 uger.
- Kontroller kan bruges direkte fra køleskabet.
- Den målte værdi skal være inden for det acceptable område, der er angivet i indlægssedlen for Afinion™ Lipid Panel Kontrol.
- Læs indlægssedlen angående anbefalet hyppighed for kontroltestning.

AFINION™ 2-instrumentet

- Tænd for analyseinstrumentet og intast eventuelt operatør-ID.
- Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på bagsiden.
- Der fremvises muligvis en informationskode under analysen.
Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet, er angivet i brugermanualen til **AFINION™ 2-instrumentet**.



Konsulter AFINION™ brugervejledning for komplet information

- Afinion Lipid Panel-indlægsseddel.
- Afinion Lipid Panel Kontrol-indlægsseddel.
- Brugermanual til **AFINION 2-instrumentet**.

Fingerprik-procedure

- En varm hånd og god blodgennemstrømning fra punkturstedet er vigtigt for at udtage en brugbar kapillærprøve: Vask patientens hånd i varmt vand og/eller massér forsigtigt fingeren fra roden til spidsen flere gange.
- Brug altid handsker.
- Vælg et punktursted på en af de midterste fingre på en af hænderne.
- Rengør fingeren to gange med alkohol.
- Tør fingeren grundigt med en gazeserviet, inden der stikkes i fingeren.
- Brug en lancet til at prikke i fingeren på det udvalgte sted.
- Klem forsigtigt om fingeren for at trykke en dråbe blod ud og tør denne første dråbe væk.
- Klem igen forsigtigt om fingeren, indtil der dannes en ny stor dråbe. Malk ikke fingeren. Punkturen skal skabe en fritflydende bloddråbe. Overdreven klemning af fingeren kan give et fejlagtigt resultat.
- Fyld kapillærrøret i henhold til proceduren beskrevet på modsatte side.





Vigtige informationskoder

Kode	Årsag
101	Hæmatokrit under 20%
102	Hæmatokrit over 60%
201	Utilstrækkelig mængde prøvemateriale
202	Overskydende prøve på kapillærrørets yderside

Testprocedure




Hold testkassetten i håndtaget, vend bunden i vejret på den én gang, og vend den om igen til normal position før brug. Træk prøvetagningsenheden lige op af testkassetten.

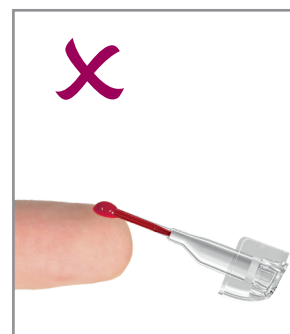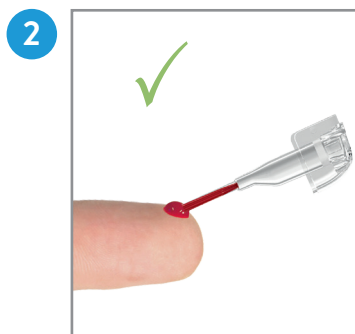

Hold prøvetagningsenheden lidt opad.


Lad enden af kapillærrøret berøre overfladen på patientprøven eller kontrolmaterialet. Sørg for at prøvetagningsenheden ikke hælder nedad. Sørg for, at kapillærrøret er helt fyldt med patientprøve eller kontrolmateriale. Undgå luftbobler og overskydende prøvemateriale uden på kapillærrøret. Tør ikke kapillærrøret af.

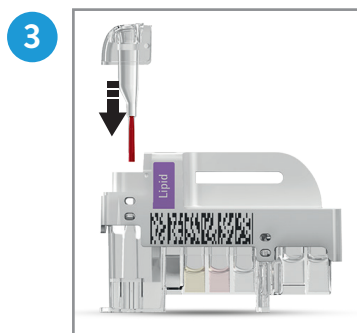

Sæt straks prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten. Analysen af testkassetten skal påbegyndes inden for 1 minut.



Tryk for patientprøver, eller tryk for kontroller. Låget åbner automatisk.

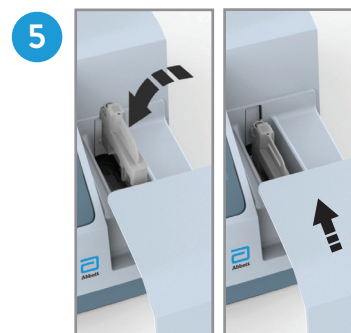

Isæt testkassetten med stregekoden mod venstre. Luk låget manuelt for at starte analysen.



Tryk og indtast patient-ID, eller tryk og indtast kontrol-ID. Tryk for at bekræfte.



Gem resultatet, når det kommer frem på displayet. Tryk for accept. Låget åbner automatisk.



Fjern og bortskaf den brugte testkassette straks efter brug. Luk låget manuelt, når analyseinstrumentet ikke er i brug.