

Klargøring til analyse

AFINION™ HbA1c-testkassette

- Opbevar testkittet i køleskab (2-8 °C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25 °C) i højst 90 dage.
- Testkassetten skal opnå en temperatur på 18-30 °C før brug. Lad den uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i ca. 15 minutter.
- Testkassetten skal anvendes inden for 10 minutter efter åbning af folieposen.
- Hold testkassetten i håndtaget.

Pasientprøve

- Brug kapillærblod direkte fra fingeren eller venøst fuldblod (med EDTA, heparin, citrat eller NaF).
- Venøst fuldblod tilsat antikoagulanter (bortset fra NaF) kan opbevares i køleskab (2-8 °C) i 10 dage eller ved stuetemperatur (18-30 °C) i 8 timer. Kapillærblod kan ikke opbevares.
- Bland prøven ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.

AFINION™ HbA1c Kontrol

- Opbevar kontrollerne i køleskab (2-8 °C). Åbne kontroller er stabile i 60 dage.
- Lad kontrollen opnå en temperatur på 15-25 °C inden brug. Det tager ca. 45 minutter.
- Bland kontrollen grundigt ved at ryste glasset i 30 sekunder inden brug. Der kan anvendes en vortexblander.
- Den målte værdi skal være inden for det acceptable område, der er angivet i indlægssedlen for AFINION™ HbA1c Kontrol.

AFINION™ 2-instrumentet

- Tænd for analyseinstrumentet og indtast eventuelt operatør-ID.
- Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på bagsiden.
- Der fremvises muligvis en informationskode under analysen. Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet er angivet i brugermanualen til AFINION™ 2-instrumentet.



Informationskoder, der er specifikke for AFINION™ HbA1c-analysen:


Kode	Årsag
103	Hæmoglobin under 6,0 g/dl
104	Hæmoglobin over 20,0 g/dl
105	HbA1c under måleområdet
106	HbA1c over måleområdet




Konsulter AFINION™ brugervejledning for komplet information:

- AFINION HbA1c-indlægsseddel.
- AFINION HbA1c Kontrol-indlægsseddel.
- Brugermanualen til AFINION 2-instrumentet


Testprocedure

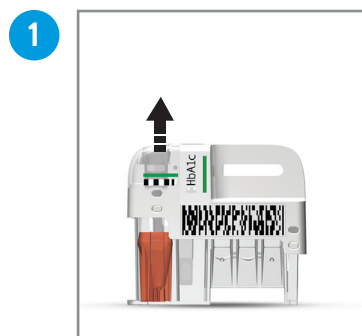

1 Træk prøvetagningsenheden lige op af testkassetten.

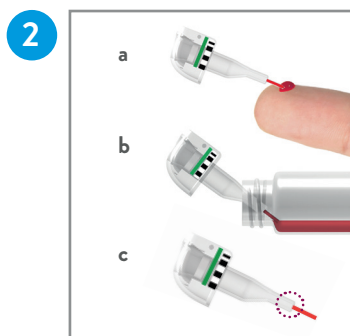

2 Sørg for, at kapillærrøret er helt fyldt (c) med patientprøve (a) eller kontrolmateriale (b).

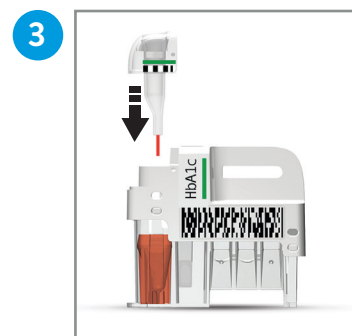

3 Sæt straks prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten. Analysen af testkassetten skal påbegyndes inden for 2-3 minutter.



4 Tryk for patientprøver, eller tryk for kontroller. Låget åbner automatisk.



5 Isæt testkassetten med stregekoden mod venstre.



6 Luk låget manuelt for at starte analysen.



7 Tryk og indtast patient-ID, eller tryk og indtast kontrol-ID. Tryk for at bekræfte.



8 Gem resultatet, når det kommer frem på displayet. Tryk for accept. Låget åbner automatisk.



9 Fjern og bortskaf den brugte testkassette straks efter brug. Luk låget manuelt, når analyseinstrumentet ikke er i brug.