



Klargøring til analyse

AFINION™ CRP-testkassette

- Opbevar testkittet i køleskab (2-8 °C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25 °C) i højst 4 uger.
- Testkassetten skal opnå en temperatur på 15-30 °C før brug. Lad den uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i ca. 15 minutter.
- Testkassetten skal anvendes inden for 10 minutter efter åbning af folieposen.
- Hold testkassetten i håndtaget.

Patientprøve

- Brug kapillærblod direkte fra fingeren, venøst fuldblod (med EDTA eller heparin), serum eller plasma.
- Venøst fuldblod skal analyseres inden for 3 dage. Serum eller plasma kan opbevares i køleskab (2-8 °C) i 10 dage. Kapillærblod kan ikke opbevares.
- Bland prøven ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.

AFINION™ CRP Kontrol

- Opbevar kontrollerne i køleskab (2-8 °C). Åbne kontroller er stabile i 4 uger.
- Kontrollen kan bruges direkte fra køleskabet.
- Bland kontrollen ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.
- Den målte værdi skal være inden for det acceptable område, der er angivet i indlægssedlen for Afinion™ CRP Kontrol.

AFINION™ 2-instrumentet

- Tænd for analyseinstrumentet og indtast eventuelt operatør-ID.
- Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på bagsiden.
- Der fremvises muligvis en informationskode under analysen. Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet er angivet i brugermanualen til **AFINION™ 2** -instrumentet.



Informationskoder, der er specifikke for AFINION™ CRP-analysen:


Kode	Årsag
101	Hæmatokrit under 20 %
102	Hæmatokrit over 60 %




Konsulter AFINION™ brugervejledning for komplet information:

- Afinion CRP-indlægsseddel.
- Afinion CRP Kontrol-indlægsseddel.
- Brugermanualen til **AFINION 2**-instrumentet.


Testprocedure

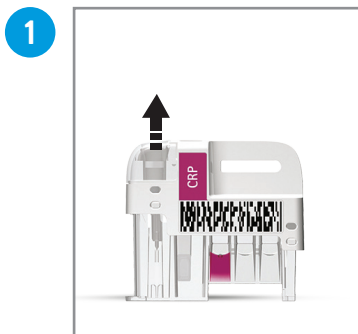

Træk prøvetagningsenheden lige op af testkassetten.

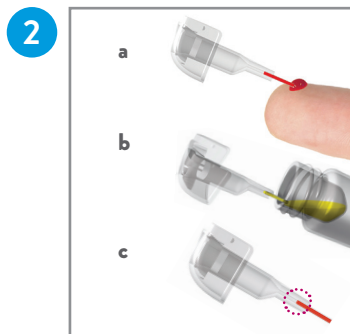

Sørg for, at kapillærrøret er helt fyldt (c) med patientprøve (a) eller kontrolmateriale (b). Tør ikke kapillæret af.

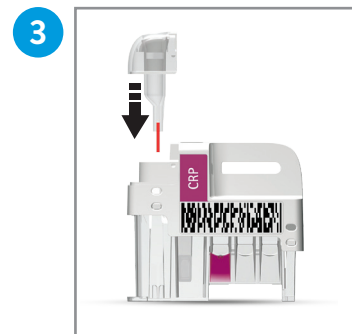

Sæt straks prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten. Analysen af testkassetten skal påbegyndes inden for 1 minut.



Tryk for patientprøver, eller tryk for kontroller. Låget åbner automatisk.



Isæt testkassetten med stregekoden mod venstre.



Luk låget manuelt for at starte analysen.



Tryk og indtast patient-ID, eller tryk og indtast kontrol-ID. Tryk for at bekræfte.



Gem resultatet, når det kommer frem på displayet. Tryk for accept. Låget åbner automatisk.



Fjern og bortskaf den brugte testkassette straks efter brug. Luk låget manuelt, når analyseinstrumentet ikke er i brug.