



Varenummer 1000013830

## Bandage, Juzo ACS light, underbensegment, beige, 3-medium-normal-venstre

✓ Kan tilpasses individuelt med burrebåndslukninger.



### Produktbeskrivelse

Juzo ACS light er et kortstrækskompressionssystem, der kan anvendes som et effektivt supplement i aflastningsfasen. Juzo ACS light produkterne kan tilpasses individuelt med burrebåndslukninger. Takket være de inkorporerede inlets er de enkle at håndtere og kan lægges på i en håndvending. Patient compliance øges med den enkle pålægning. En kompressionsbehandling op til 40 mmHg er mulig.

### Specifikationer

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktbetegnelse            | Bandage   |
| Varemærke                    | Juzo  |
| Vareserie                    | ACS light   |
| Sekundær farve               | Beige   |
| Ingredienser/sammensætning   | 85% polyamid, 15% elastan   |
| Målepunkter                  | Underbensegment   |
| Strømpestørrelse             | 3-medium-normal-venstre   |
| Certifikater                 | CE. MD.   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I  |
| HMI-nr.                      | 107466  |
| Opbevaringsinstruktioner     | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.  |
| Vaskeanvisninger             | Før vask skal du sikre at alle burrebåndslukninger er lukket. Kom Juzo ACS light produktet i en vaskepose. Vask Juzo ACS light produktet mindst en gang om ugen eller ved behov. Juzo ACS light produktet kan vaskes i vaskemaskine ved 30°C og med et vaskemiddel til sarte stoffer. Brug ikke skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel. Brug ikke tørretumbler. For at reducere tørretiden, kan Juzo ACS light produktet presses let mellem et håndklæde, lad ikke Juzo ACS light produktet blive i håndklædet og tør det ikke på en radiator eller i solen. Juzo ACS light produktet må ikke stryges eller kemisk renses. |
| Bortskaffelse af produkt     | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.  |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan genanvendes eller forbrændes.   |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 38 cm  | 26.5 cm | 3.5 cm | 4056403471844 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.