



Varenummer 1000019801



## Underlag, ABENA Abri-Soft Superdry, 90x60cm, med SAP

- ✓ Absorberende kerne af fluff og SAP
- ✓ Blød og glat nonwoven overflade
- ✓ Diamantformet prægning for hurtig absorption af væske
- ✓ Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser og versioner med tape eller sidestykker



### Produktbeskrivelse

ABENA Abri-Soft Superdry anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole, så brugeren kan føle sig tryk i enhver situation. Engangsunderlaget er primært tiltænkt ikke-sterile procedurer som sårpleje og blødprøvetagning, men kan med fordel anvendes som beskyttende underlag ved inkontinensproblemer. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage samt en diamantformet prægning, som sikrer hurtig absorption. Odor-systemet minimerer ubehagelige lugte. Overfladen er dækket af et blødt non-woven materiale, som giver brugeren optimal komfort. Ud over at underlaget hjælper til at skabe ro og tryghed, når man sidder eller ligger ned, er det også med til at mindske risikoen for kontaminering og øge hygiejnen. ABENA Abri-Soft Superdry har en let til moderat absorberingssevne og er tilgængelig i mange størrelser, så du er sikker på at finde lige præcis den løsning, der matcher dit behov. Der findes to versioner: én med sidestykker og én med tape. Begge modeller er særligt velegnet til aktive og urolige brugere, idet de sikrer, at underlaget ikke flytter sig.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Soft Superdry
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med SAP
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, fluff, nonwoven, SAP
Længde/dybde	90 cm
Bredde	60 cm
Vægt, netto	48 g
Tolerance	+/- 5 cm
Absorptionsevne	1400 ml
Certifikater	CE. FSC Mix. MD. Svanemærket. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 pk	60.9 cm	39.4 cm	29 cm	5703538406805
pk	25 stk	28 cm	20 cm	27 cm	5703538406898



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. FSC® Mix betyder, at produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se [www.fsc.org](http://www.fsc.org) for yderligere oplysninger.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Superabsorberende polyacrylat er et råmateriale, der kan opsuge og fastholde store mængder væske ved at danne en gel.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet har en meget blød overflade, der sikrer en behagelig pasform.



Væskesikker bagside for øget beskyttelse mod lækager.



Diamantmønstret maksimerer sugesevnen ved at fordele væsken gennem kanalerne i underlaget.

