



Varenummer 1000021314



Åben ble, ABENA San, Special, grøn, støvgrøn farvekode, Premium

- ✓ Til fækalinkontinens
- ✓ Effektiv kerneteknologi med Top-Dry teknologi
- ✓ Unikke lækagebarrierer med indbyggede lommer
- ✓ Understøtter en sund hud
- ✓ Odor Control minimerer ubehagelige lugtgener



Produktbeskrivelse

ABENA San Special er vores anatomisk formede ble designet specielt til afføringsinkontinens. Bleen kan bruges til både fækal- og urininkontinens og har en tekstillignende lysegrøn bagsidefolie, som giver optimal komfort og diskretion. Bleen har ekstra høje lækagebarrierer, der sikrer at afføring bliver i bleen. Den effektive kerne med Top-Dry teknologi giver hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger, og sikrer optimal hudbalance og øger komforten. De fuldt åndbare bleer er forsynet med opretstående lækagebarrierer kombineret med indbyggede tværgående barrierer for og bag, hvilket giver en 360 graders lækagebeskyttelse. Kombinationen af disse funktionaliteter hjælper med at beskytte huden og opretholde en naturlig hudbalance. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. Våddindikatoren hjælper brugeren og plejepersonalet med at finde produktet med det rette absorptionsniveau og det rette tidspunkt for produktskift. De dermatologisk testede produkter bærer Svane-mærket. ABENA San Special bør altid bruges sammen med specielt fikseringsundertøj, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusserne sikrer en tætsiddende pasform og mindsker risikoen for lækager.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Åben ble
Varemærke	ABENA
Vareserie	San
Størrelse	Special
Farve	Grøn
Features	Støvgrøn farvekode
Materiale	ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	73 cm
Bredde	37 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	2000 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Meget svær
Kvalitetsniveau	Premium
Certifikater	CE. MD. Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anatomisk formet ble designet til kombineret fækal- og urininkontinens. Nem produktgenkendelse ved hjælp af farvet bagsidefolie samt påtrykt navn. ABENA San Special bør altid bruges med specielt fikseringsundertøj, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusserne sikrer, at bleen holdes tæt ind til kroppen, og reducerer risikoen for lækage. Træk fikseringstrusserne op midt på benene. Fold bleen på langs for at skabe en skålform med bagsiden vendt udad. Før bleen mellem benene forfra og bagud. Placer den øverste kant af bleen ved halebenet. Bred bagsiden af bleen vandret ud for at skabe en skålform mellem benene. Brug vådindikatoren til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten. Fold bleen vandret ud foran. Træk fikseringstrusserne op på plads. Se vores påsætningsvejledning for detaljeret information.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	60 cm	40 cm	45.2 cm	5713571000717
pk	30 stk	34.5 cm	20 cm	29 cm	5713571000700
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Lækagebarrierer i benudskæringen og omkring den absorberende kerne beskytter mod lækage og giver en optimal pasform.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Den højtydende kernes unikke struktur er designet til hurtig fordeling og indkapsling af urin, hvilket sikrer en tør overflade – også ved gentagne vandladninger.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Vådindikatoren er en væskefølsom strimmel, som skifter farve eller flyder ud, hvilket indikerer, hvor stor en del af produktet, der er udnyttet.



En kombination af 100% åndbarhed, Top-Dry og lækagebarrierer giver en tør overflade og sund hud, selv efter gentagne vandladninger, hvorved hudens naturlige pH-balance opretholdes.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-12 dråber.



Produktet indeholder ikke latex.



Unik Top-Dry teknologi som sørger for hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.

