



Varenummer 1000026006

## Desinfektionsmiddel, Erisan Oxy+, uden farve og parfume, portionsbreve 50 g.

- ✓ Overfladedesinfektion af inventar og ikke-kritisk medicinsk udstyr
- ✓ Rengøring/præ-desinfektion af kirurgiske instrumenter
- ✓ Uden parfume parfume
- ✓ Praktiske portionsposer med granulat der ikke støver
- ✓ CEI vurderet til high-level henstandsdesinfektion
- ✓ CE-mærket medicinsk udstyr, klasse IIa, NB 0537



### Produktbeskrivelse

Det granulerede pulver støver ikke og aktiveres nemt i varmt vand, hvorved de aktive stoffer Hydrogenperoxid og pereddikesyre genereres. Indeholder ikke parfume. Produktet kan anvendes til de fleste typer materialer, herunder sart materialer som aluminium, gummi og plastic. Bør ikke anvendes på kobber, sølv og messing. Produktet er CEI vurderet af statens serum institut.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektionsmiddel
Varemærke	Erisan
Vareserie	Oxy+
Features	Uden farve og parfume, portionsbreve 50 g.
pH-værdi (konc.)	7.5
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Doseringsinstruktioner	Dosering: 2% opløsning: 50 g (1 brev) blandes med 2,5 liter vand 5% opløsning: 50 g (1 brev) blandes med 1 liter vand (high level) Lav en 2% eller 5% opløsning ved at blande produktet med rent varmt vand (30-40°C). Rør et par gange i opløsningen for at få granulatet til at opløses hurtigere. Opløsningen er klar til brug, når granulatet er helt opløst. Lav opløsningen i en stor beholder, da den kemiske reaktion får opløsningen til at skumme op.
Holdbarhed	30 måneder fra produktionsdato

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	29 cm	20 cm	19.5 cm	6417964081169
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 <p>Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>
 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskytteshandsker.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet bruges til desinfektion.</p>