

Pep/Rmt™

Forbedring – åndedrag for åndedrag

Pep/Rmt respirationstræning med flere
anvendelsesmuligheder




Pep/Rmt – fire kategorier af respirationsbehandling med et enkelt produkt

Pep/Rmt™ er et enkelt og let anvendeligt trænings sæt til forbedring af patientens respirationsfunktion. Der kan vælges mellem en række forskellige masker og modstande som gør det muligt at sammensætte et værktøj til respirationstræning eller minimering af symptomer. Kan anvendes i klinikken såvel som i hjemmet. Pep/Rmt kan skræddersys til fire specifikke behandlinger, som dækker alle patientkategorier.

- Let at bruge og justere for både patienter og sundhedsfagligt personale.
- Flere skaleringsmuligheder gør det muligt at justere parametre, efterhånden som patientens tilstand ændrer sig.
- Hurtig montering og afmontering.
- Dokumenteret effekt¹⁻⁴

Referencer:



1. Ricksten SE, Bengtsson A, Soderberg C, Thorden M, Kvist H. Effects of periodic positive airway pressure by mask on postoperative pulmonary function. Chest 1986;89(6):774-81.
2. Geddes EL, Reid WD, Crowe J, O'Brien K, Brooks D. Inspiratory muscle training in adults with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Respiratory Medicine 2005;99:1440-58.
3. Elkins MR, Jones A, van der Schans C. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2006 Apr 19;(2):CD003147.
4. Oberwaldner B, Evans JC, Zach MS. Forced expirations against a variable resistance: A new chest physiotherapy method in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 1986;2:358-67.

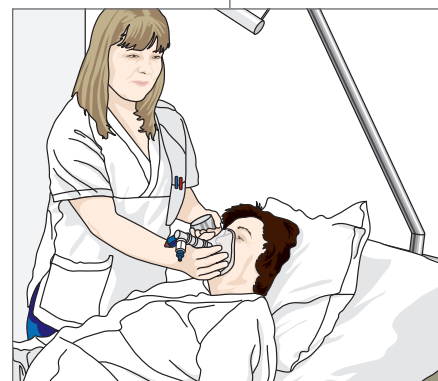

PEP til normalisering af reduceret lungevolumen. PEP kan bruges til

at normalisere reduceret lungevolumen, som kan opstå som følge af immobilisering, anæstesi/operation og neurologiske sygdomme.



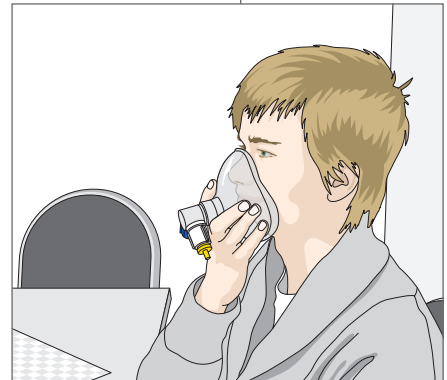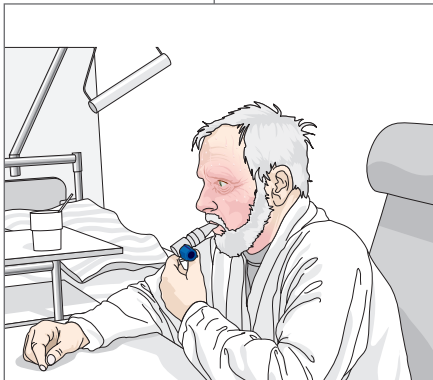

PEP til normalisering af øget lungevolumen.

PEP kan bruges til at reducere excessiv funktionel residualkapacitet, f.eks. i svære stadier eller ved forværring af obstruktiv lungesygdom.



Inspiratorisk muskeltræning.

IMT kan bruges til styrke- og udholdenhedstræning af inspirationsmuskulaturen hos patientgrupper med nedsat muskelfunktion, f.eks. ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og diverse neurologiske sygdomme. Det bruges også til at nedsætte risikoen for postoperative lungekomplikationer hos patienter som gennemgår hjerteoperation, og til sportsfolk for at øge deres præstation.



Fjernelse af sekret ved hjælp af PEP og HiPEP. PEP kan bruges ved øget sekret i luftvejene, f.eks. ved cystisk fibrose samt KOL og ved infektion hos personer med flere svære funktionsnedsættelser.

HiPEP er en metode til fjernelse af sekret fra luftvejene ved hjælp af forceret eksspiration mod en ekspiratorisk modstand indtil residualvolumen.



Produktsortiment

Pep/Rmt sæt – maske/mundstykke, ventil og modstande

71100	Pep/Rmt™ sæt med maske til spædbørn	1 sæt
71101	Pep/Rmt™ sæt med maske til børn	1 sæt
71102	Pep/Rmt™ sæt med maske til unge	1 sæt
71103	Pep/Rmt™ sæt med maske til voksne	1 sæt
71104	Pep/Rmt™ sæt med maske til voksne, stor	1 sæt
71108	Pep/Rmt™ sæt med mundstykker	1 sæt

Ventil og Modstand

71119	Pep/Rmt™ ventil	1 stk
71120	Sæt med 8 modstande	8stk
71121	Modstand 1,5 mm sort	5 stk
71122	Modstand 2 mm hvid	5 stk
71123	Modstand 2,5 mm gul	5 stk
71124	Modstand 3 mm blå	5 stk
71125	Modstand 3,5 mm grøn	5 stk
71126	Modstand 4 mm orange	5 stk
71127	Modstand 5 mm brun	5 stk
71128	Modstand 6 mm violet	5 stk

Tilbehør

71109	Pep/Rmt™ Mundstykke	3 stk
71110	Pep/Rmt™ Maske til spædbørn	1 stk
71111	Pep/Rmt™ Maske til børn	1 stk
71112	Pep/Rmt™ Maske til unge	1 stk
71113	Pep/Rmt™ Maske til voksne	1 stk
71114	Pep/Rmt™ Maske til voksne, stor	1 stk
71118	Tracheostomi adapter	1 stk
71130	Pep/Rmt™ manometer -100 til +150 cm H2O +T-mellemstykke	1 stk
71131	Pep/Rmt™ manometer -30 til +30 cm H2O +T-mellemstykke	1 stk
71132	T-mellemstykke til manometer	1 stk
71133	Reserveglas til manometer	1 stk



71100 - 04



71108



71109



71110 - 14



71118



71119



71120 - 28




71130



71131



71132

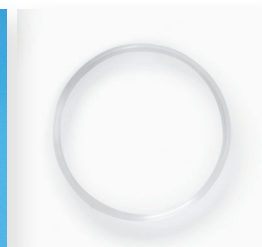

71133

Mediplast tilbyder omfattende hjælp og uddannelse til vores produkter. Vi er stolte af at tilbyde enkle kvalitetsprodukter, som er gennemtestede og nemme at anvende. Tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål vedrørende Pep/Rmt systemet. Vi hjælper dig meget gerne.

Størrelsesguide Masker

L x B x H

71110	Maske til spædbørn	70mmx60mmx48mm
71111	Maske til børn	85mmx71mmx48.3mm
71112	Maske til unge	101mmx80mmx70mm ±5mm
71113	Maske til voksne	115mmx90mmx80mm ±5mm
71114	Maske til voksne, stor	125mmx100mmx83mm ±5mm