



Pereddikesyre baseret desinfektionsmiddel på pulverform, beregnet til desinfektion af kirurgiske instrumenter, til desinfektion på sekundært og højt niveau af instrumenter, stive og fleksible endoskoper og til overfladedesinfektion af medicinsk udstyr.

Effektivt
og økonomisk

chirosan® plus

Vores fordele:

- Fuldspektret effekt
- Kombination af 3 enzymer
- Effektiv fra 5 minutter
- Opløselig, ikke-skummende
- Opløsningen er stabil i op til 36 timer

Anvendelsesområde:

chirosan® plus er beregnet til manuel desinfektion og rengøring af instrumenter og hjælpemidler umiddelbart efter brug ved nedsænkning i en tidligere forberedt arbejdsopløsning. Den er også velegnet til brug i ultralydsrensere.

Præparatet er velegnet til desinfektion af:

- medicinsk udstyrs overflader ved aftørring (hydroterapi)
- dentale aftryksmaterialer
- anæstesiudstyr
- tonometre
- åndedrætsmasker
- endoskoper, inkubatorer mm.

chirosan® plus er kompatibel med almindelige materialer, der bruges i sundhedssektoren. Det anbefales til instrumenter og hjælpemidler fremstillet af kirurgisk stål, glas, plast, gummi, porcelæn, keramik og plexiglas. Ikke til brug på instrumenter lavet af messing, kobber, aluminium, nikkel eller forkromede instrumenter med mekanisk beskadigede overflader.

Brugsanvisning:

Desinficerende opløsning fremstilles ved at opløse den afmålte mængde **chirosan® plus** i vand med en temperatur på 20 °C + -1. Omrør opløsningen godt. Efter 15 minutters aktiveringstid og efter gentagen omrøring er opløsningen klar til brug.

Brugte instrumenter og genstande nedsænkes helt i den aktiverede opløsning af **chirosan® plus** for at sikre, at alle instrumenthulrum bliver fyldt med opløsning (ingen luftbobler). Efter eksponeringstiden tages instrumenterne op og skylles med vand.

Overflader på medicinsk udstyr kan også desinficeres ved at tørre af med en klud, der er vædet i en arbejdsopløsning. Synligt snavsede genstande skal først rengøres og desinficeres efterfølgende.

Effektspektrum:

Baktericid, fuldstændig virucid, mycobaktericid, , fungicid, og sporocid effect.



chirosan® plus

Produktdata:

Sammensætning:

chirosan® plus indeholder følgende aktive stoffer:

- in situ genereret pereddikesyre
(2 % opløsning indeholder mere end 1000 ppm pereddikesyre)

Kemisk-fysiske data:

Form	Hvidt pulver
Lugt	Parfumefrit
pH (2 % opløsning)	7,5 -8,5

Logistiske data:

Produkt navn	Emballage	Stk. i karton
chirosan® plus	1,5 kg spand	1

Særlige råd:

Kun til det professionelle marked. Følg brugsanvisningen omhyggeligt. Brug ikke på instrumenter lavet af messing, kobber, aluminium, nikkel eller forkromede instrumenter med mekanisk beskadigede overflader.

Holdbarhed:

24 måneder

Type produkt:

Medicinsk udstyr klasse IIb [CE 1023]

Miljøoplysninger:

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsprocesser, samtidig med at vores høje kvalitetsstandarder opretholdes.

Schulke CZ, sro er indehaver af kvalitetscertifikater ISO 13485 og ISO 9001.

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

telefon: +45 70 266 244

info.wetwipe@schulke.com



Yderligere oplysninger:

Besøg vores hjemmeside:

➡ www.schulke.cz

Producent

Schulke CZ, s.r.o
Lidická 445
735 81 Bohumín,
Czech Republic
tel.: +420 558 320 260,
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com

Danish distributør

Wet Wipe A/S
Vallensbaekvej 65
2625 Vallensbaek
Denmark
tel +45 70 266 244
www.wetwipe.eu
info@wetwipe.eu