

multifixTM gentle

Universel sikker
fiksering af
medicinske slanger


Med silikoneteknologi for
atraumatisk **patientoplevelse**



optimummedical[®]



Universel fiksering til medicinske slanger

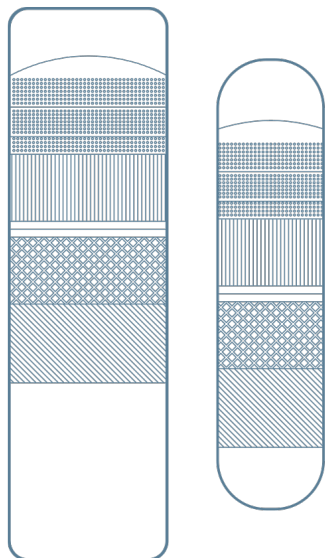

Stor



Lille



Op til 7 dage

Sikker, pålidelig og skånsom

Multi Fix Gentle er en universel fiksering til medicinske slanger og urinvejskatetre. Den er udviklet til at gøre fikseringen komfortabel, hvilket giver patienten tryghed til at bevæge sig frit omkring.

Multi Fix Gentle findes i 2 størrelser, der har en række forskellige anvendelsesmuligheder og hver enkelt kan bruges i op til 7 dage.

'Korrekt fiksering er en prioritet' ¹

Multi Fix Gentle gør brug af en blød silikoneteknologi, som sikrer, at den er nem at anvende, omplacere og atraumatisk, når den fjernes.

BLØD
SILIKONE
GENKLÆBENDE
GELSTRIMMEL


Fordi '... nogle patienter lider af beskadiget hud, som gør stabiliseringen mere udfordrende' ²

Multi Fix Gentle er delite designet med en blød silicone-klæbende gelstrimmel som tilpasser sig huden, og giver en række patientorienterede fordele, delite:

- Atraumatisk fjernelse fra huden uden brug af løsninger, som opløser klæb
- Der efterlades ikke klæberester
- Tilpasser sig alle hudtyper via flere kontaktpunkter
- Kan anvendes på det samme hudområde gentagne gange
- Klæberen gør den nem at omplacere
- Der er ikke behov for nogen kompleks forberedelse af huden (intet behov for at barbere hud med hår før anvendelsen)
- Minimal risiko for allergiske reaktioner på grund af silikoneteknologien
- Vandafvisende, åndbar og transparent

TILBYDER EFFEKTIV FIKSERING AF SLANGE

Kan anvendes til fiksering af en række forskellige medicinske slanger

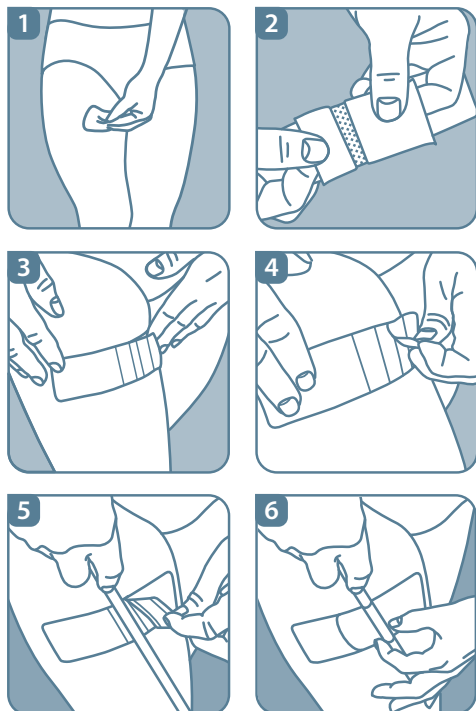

- Det er muligt at fjerne og omplacere slange
- Efterlader ingen klæberester på slanger
- Kan anvendes til slanger med en række forskellige diametre

BRUGERVEJLEDNING

- 1 • Sørg for, at huden er ren og tør (der er ikke behov for at forberede og barbære huden)
- 2 • Fjern bagsiden fra Multi Fix Gentle
- 3 • Påsæt Multi Fix Gentle på huden på det ønskede sted og glat ud, så den sidder korrekt
- 4 • Aftag den forreste tap på Multi Fix Gentle-strimlen og fjern det klæbefrie papir for at afdække klæberen
- 5 • Placer kateteret eller slangen på støttepuden og placer den klæbende tap på plads over kateteret eller slange for at fiksere det
- 6 • Sørg for at dit kateter eller slange ikke trækker, og at du er i stand til at bevæge dig frit omkring med det på.

Hvis du har brug for at omplacere Multi Fix Gentle, skal du bare trække det af og placere det på huden igen. Derudover kan slangen også blive omplaceret alt efter behov.

Æske Varenummer	Produktbeskrivelse	Størrelse	Æske	Karton
603030	Multi Fix Gentle (stor)	140X40mm	Æske med 10	Karton med 200
603031	Multi Fix Gentle (lille)	110X25mm	Æske med 10	Karton med 200

PRÆFERENCER

¹ Bell M A (2010) Severe Indwelling Urinary Catheter-Associated Urethral Erosion in four elderly men. Ostomy and Wound Management. December 2010 pp36-39

² Callan L. & Parker D. et al. (2012) Wound, Ostomy and Continence Nurse Society, Clinical Practice Continence Committee. Indwelling Urinary Catheter Securement: Best Practice for Clinicians; Available at <http://www.faet.org/docs/indwellingurinarycathetersecurement.pdf>

Vi er specialister i fikseringsprodukter

Få mere at vide om **Optimum Medical** produkter, inklusive vores **Ugo Fix**-serie, ved at besøge:

www.optimummedical.co.uk



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Mediplast AS

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00 | info.dk@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

