

(NO)	smith&nephew
SECURA° NO-STING BARRIER FILM	
Barriere film, serviett, lollipop og spray	
	
Produktbeskrivelse	
SECURA° NO-STING BARRIER FILM er et steril, flytende, filmdannende produkt som inneholder et løsemiddel som ikke svir og som tørker hurtig. SECURA NO-STING BARRIER FILM bidrar til å beskytte intakt eller skadet hud mot irritasjon avførmingskontinens, fordyrelsesvæsker, sårwæske, klebemidler og friksjon. Når produktet brukes på intakt eller skadet hud, danner det en film som beskytter huden der dren, eksterne katetre, stombandasjer og selvheftende bandasjer skal festes. Filmen er fargeløs og gjennomskiktig mot huden.	
Ingredienser	
Heksametyldisiloksan, akrylatkopolymer.	
Indikasjoner	
SECURA NO-STING BARRIER FILM er en væske beregnet til bruk som et filmdannende produkt som ved anvendelse på intakt eller skadet hud danner en langvarig, vannlett spenne som virker som en beskyttende kontaktflate mellom huden og kroppens avfallsstoffer, væsker, selvheftende bandasjer, dren, eksterne katetre og stombandasjer. Produktet kan også brukes på hæler, albuer og andre kroppsdeler som er utsatt for irritasjon på grunn av friksjonsskade forårsaket av eksterne flater som for eksempel sengeløy og madrasser. Produktet kan brukes på voksne, barn og fullbårne spedbarn fra én måned gamle.	
Forholdsregler	
1. Skulle det vise seg tegn på irritasjon (rødhet, inflammasjon) eller sensitivisering (allergiske reaksjoner), må bruken avsluttes og lege/ helsepersonell konsulteres. 2. Må ikke brukes på pasienter som har en kjent allergi overfor noen av ingrediensene. 3. Dette produktet anbefales ikke til bruk på følsomme områder, som for eksempel i ansiktet og rundt øynene, med mindre det er anbefalt av helsepersonell. I tilfelle kontakt ved et uhell skal øynene skylles godt med vann. 4. Må ikke legges på infiserte områder av huden. 5. Innholdet i sprayflasken er sterilisert inniil første gangs bruk.	
Advarsel	
SECURA NO-STING BARRIER FILM er lett antennelig: Brukes på et godt ventilerit område. Unngå bruk nær flammer eller tenningskilder. Oppbevares utlilgjengelig for barn. Kun til utvortes bruk.	
Bruksanvisning	
Vennligst følg bruksanvisningen du har fått av din lege, sykepleier eller	

(FI)	smith&nephew
SECURA° NO-STING BARRIER FILM	
Suojakalvo pyyhe, vanupuikko ja suihke	
	
Produktbeskrivelse	
SECURA° NO-STING BARRIER FILM er et steril, flytende, filmdannende produkt som inneholder et løsemiddel som ikke svir og som tørker hurtig. SECURA NO-STING BARRIER FILM bidrar til å beskytte intakt eller skadet hud mot irritasjon avførmingskontinens, fordyrelsesvæsker, sårwæske, klebemidler og friksjon. Når produktet brukes på intakt eller skadet hud, danner det en film som beskytter huden der dren, eksterne katetre, stombandasjer og selvheftende bandasjer skal festes. Filmen er fargeløs og gjennomskiktig mot huden.	
Ingredienser	
Heksametyldisiloksan, akrylatkopolymer.	
Indikasjoner	
SECURA NO-STING BARRIER FILM er en væske beregnet til bruk som et filmdannende produkt som ved anvendelse på intakt eller skadet hud danner en langvarig, vannlett spenne som virker som en beskyttende kontaktflate mellom huden og kroppens avfallsstoffer, væsker, selvheftende bandasjer, dren, eksterne katetre og stombandasjer. Produktet kan også brukes på hæler, albuer og andre kroppsdeler som er utsatt for irritasjon på grunn av friksjonsskade forårsaket av eksterne flater som for eksempel sengeløy og madrasser. Produktet kan brukes på voksne, barn og fullbårne spedbarn fra én måned gamle.	
Forholdsregler	
1. Skulle det vise seg tegn på irritasjon (rødhet, inflammasjon) eller sensitivisering (allergiske reaksjoner), må bruken avsluttes og lege/ helsepersonell konsulteres. 2. Må ikke brukes på pasienter som har en kjent allergi overfor noen av ingrediensene. 3. Dette produktet anbefales ikke til bruk på følsomme områder, som for eksempel i ansiktet og rundt øynene, med mindre det er anbefalt av helsepersonell. I tilfelle kontakt ved et uhell skal øynene skylles godt med vann. 4. Må ikke legges på infiserte områder av huden. 5. Innholdet i sprayflasken er sterilisert inniil første gangs bruk.	
Advarsel	
SECURA NO-STING BARRIER FILM er lett antennelig: Brukes på et godt ventilert område. Unngå bruk nær flammer eller tenningskilder. Oppbevares utlilgjengelig for barn. Kun til utvortes bruk.	
Bruksanvisning	
Vennligst følg bruksanvisningen du har fått av din lege, sykepleier eller	

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com ©Smith & Nephew Utgivelsesdato 03/2020 *Varemerke til Smith & Nephew. Produsert i USA.

STERILE R																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

