



Varenummer 1000028091

Fluorescerende væske, 10 ml, Visirub, til test af hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Fluorescerende væske til test af hånddesinfektion.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fluorescerende væske
Features	Visirub, til test af hånddesinfektion
Engangs/flergangs	Engangs
pH-værdi (konc.)	7.5
Rumindhold, netto	10 ml
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Ved sår, rifter, eksem eller allergi på hænderne, må produktet ikke anvendes.
Holdbarhed	130 dage
Holdbarhed, åbnet	90 dage

Brugsanvisning

• Hæld hele indholdet fra en tube Visirub i 500 ml flydende håndsprit • Ryst flasken forsigtigt • Sæt den vedlagte Visirub label på flasken med blandingen, som nu er klar til undervisningsbrug • Blandingen er holdbar i 3 mdr., hvis den opbevares mørkt. Ved undervisning: • Hæld 2-3 ml af ovenstående blanding op i den hule hånd og fordel det på hænderne efter samme princip som ved almindelig hånddesinfektion. • Når hænderne herefter betragtes under ultra violet lys, vil de behandlede områder på hænderne, hvor Visirub er påført, fremstå som hvide og rene. De områder, der ikke er behandlet og desinficeret korrekt, vil derimod være mørke. • Afslut med at vaske hænderne omhyggeligt med vand og sæbe.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	20 stk	21 cm	14 cm	10 cm	
stk	10 ml				



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.

