


## Urisys® 1100

### - maskinel måling af urinstix med Combur<sup>10</sup> Test® UX




Udfør kalibrering med Control-Test M kalibreringsstrimler hver 7. dag.  
- Se bagsiden af dette ark for fremgangsmåde.



Hvis et skærbillede med [**Advarsel 6** Ingen gyldig brugerkalibrering] kommer frem, og du skal til at udføre en patienttest, **så tryk på firkanten til venstre for Udskyd, så denne markeres med et ✓, og tryk derefter på**  **- Hvis man ikke sætter vingebeben i den lille firkant først, skifter skærmen til kalibreringsmenuen (se bagsiden).**

### Fremgangsmåde - patienttest

1. Vælg **Patienttest**
2. **Scan/indtast** patient-ID (alternativt efterlades det gule felt blankt)
3. Tag en urinteststrimmel op fra Combur<sup>10</sup> Test® UX bøtten, og **luk låget på bøtten med det samme.**
4. **Dyp teststrimlen kort (1 sekund)** i patientens urinprøve.
  - Undlad så vidt muligt at bøje teststrimlen.
  - Træk teststrimlens kant langs prøvebeholderens kant på vej op, for at fjerne overskydende urin.
5. Læg med det samme teststrimlen i teststrimmelslæden, og **tryk ✓**
6. Inkubationstiden starter, og målingen går i gang. Når målingen er færdig, printes resultaterne, og de vises på instrumentskærmen, og gemmes i hukommelsen.
  - Resultater, som er negative eller normale, vises med **sort skrift** på skærmen.
  - Resultater, som afviger fra negative- eller normale værdier, vises tydeligt på skærmen med **rød skrift** og en **\*** foran parameteren. Ved udskrift vises kun **\*** ved resultatet, da der ikke printes i farve.
7. Bortskaf den brugte urinteststrimmel, og tør eventuelle rester af slæden med en fnugfri klud/spritserviet.
8. Tryk på Hjem-knappen i nederste venstre hjørne.

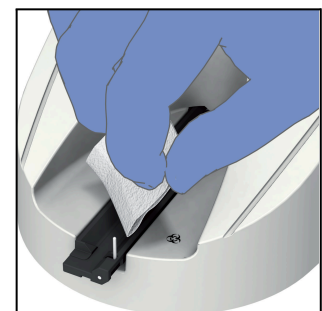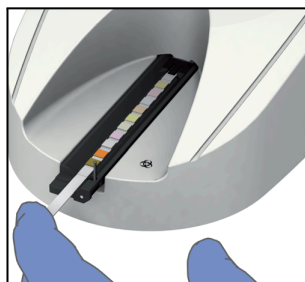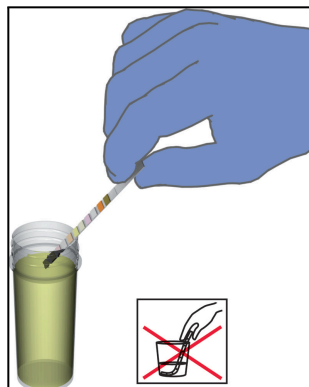

## Sådan udføres en kalibrering (1 x ugentligt, når instrumentet beder om det)

1. Vælg **Kalibrering** og tryk ✓
2. En pop-up besked vises "Placer kalibreringsteststrimlen på teststrimmelslæden".
3. Tag en kalibreringsstrimmel op fra Control-Test M bøtten, og læg den direkte i slæden.  
- **Luk låget på bøtten med det samme**, og tryk ✓ på instrumentskærmen.
4. Kalibrering udføres.
5. Når kalibreringen er færdig, vises en pop-up besked "Brugerkalibrering gennemført", og kalibreringsrapporten udskrives.
6. Tryk ✓ og bortskaf kalibreringsstrimlen.
7. Tjek, at der står "**Kalibrering OK**", og tryk herefter på Hjem-knappen i nederste venstre hjørne.
8. Instrumentet er nu klar til ugens målinger.

Urisys® 1100 vil anmode om en ny kalibrering med en ny Control-Test M kalibreringsstrimmel **syv dage efter sidste kalibrering**.



## Support

Hvis du har behov for assistance, kan Roche kundesupport kontaktes på tlf. 7020 0505 (tryk 2 for Point of Care), eller via email til [kundesupport.dk@roche.com](mailto:kundesupport.dk@roche.com)