


Urisys® 1100

Installationsvejledning Lægepraksis

- Åbn **Urisys® 1100** instrumentpakken, og tag følgende komponenter ud af pakken:

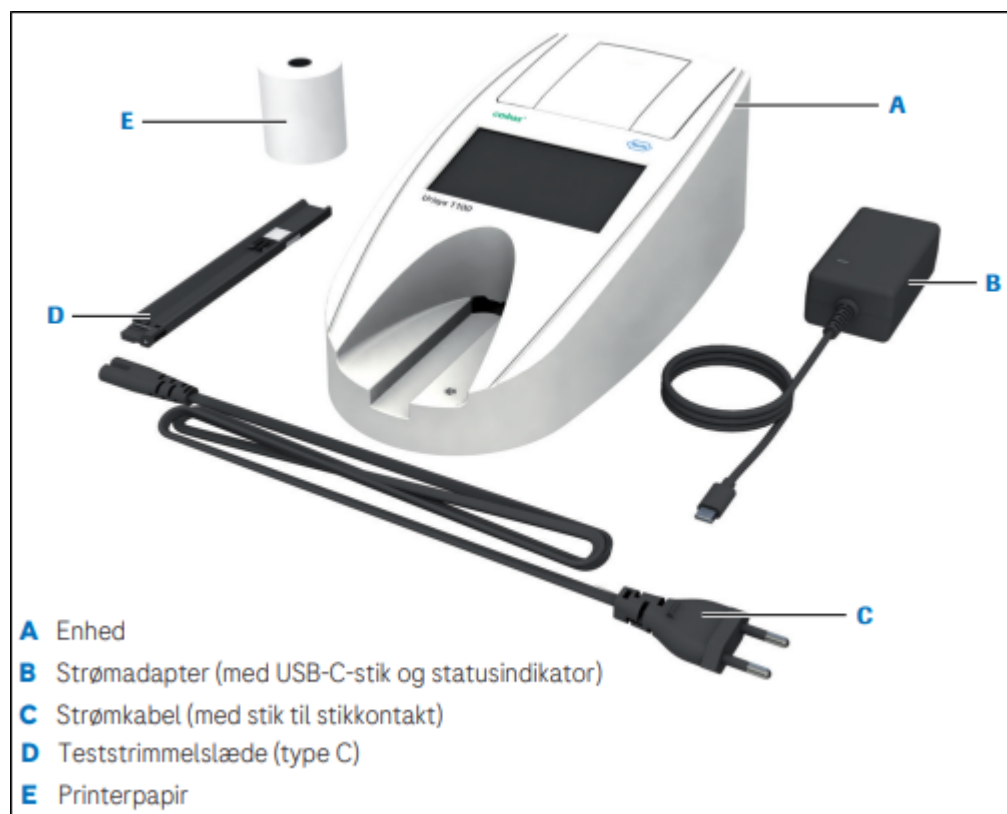

- Fjern plastposen fra **Urisys® 1100** (A), og anbring instrumentet på en stabil, plan overflade. Instrumentet må ikke stå i direkte sollys eller under andre former for direkte lys (såsom et spot).
- Strømforsyningen er i to dele (B og C). Sæt dem sammen, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Tjek at strømadaptors indikator lyser grønt. Sæt **ikke** strømforsyningen i instrumentet endnu.
- Sæt teststrimmelslæden (D) i instrumentet. Undgå at røre ved den grå firkant (referencefeltet) på slæden. Den grå firkant skal vende opad, og denne ende skal ind i instrumentet først. Slæden skubbes ind, indtil den anden ende flugter med kanten på instrumentet. Den lille metalpind (låsearmen) for enden af slæden ud mod kanten vil nu være oppe. Se evt. afsnittet "Isætning af teststrimmelslæden" i brugervejledningen.
- Fjern det første papirlag fra papirrullen (E) for at undgå limrester. Åbn instrumentets printdæksel ved at trykke ned på den runde fordybning øverst på instrumentet, og løft dækslet op ved kanten der stikker op. Læg papirrullen i, så den blanke side (ydtersiden) af papiret vender mod skærmen, og lad et stykke af papiret stikke op inden dækslet lukkes helt igen. Se evt. afsnittet "Isætning af printerpapir" i brugervejledningen.

- Sæt nu strømforsyningen til bagpå instrumentet (USB-C-port i midten, under den sorte knap).
- Tryk på den sorte Tænd-knap bagpå instrumentet. Skærmen tændes.
- Vælg sprog ved at trykke på pil ned i højre side af skærmen, tryk på Dansk, og derefter på det grønne flueben. Instrumentet udfører nu selvtest, og slæden positioneres automatisk. "Self check OK" printes.
OBS: hvis der ikke printes automatisk, vender papirrullen sandsynligvis forkert - vend papirrullen om.
- Et skærbillede med "Advarsel 6 Ingen gyldig brugerkalibrering" kommer frem. Tryk på firkanten til venstre for Udskyd så denne markeres, og tryk derefter på det grønne flueben.
- Nu vises hovedmenuen "Hjem"



knappen anvendes til at slukke instrumentet.

Menu anvendes bl.a. til indlæsning af forbrugsvarer, og til konfigureringsindstillinger.

Kalibrering anvendes til ugentlig kalibrering med Control-Test M kalibreringsstrimlerne.


Patienttest anvendes til at starte en patientmåling.

Indstil dato og tid


- Tryk på **Menu > Enhedsindstillinger > Dato/tidspunkt**
- Tjek om datoen er korrekt indstillet, ellers ret den til. Det første felt er år, så måned, så dag.
- Tjek om tiden er korrekt indstillet, ellers ret den til.
- Tjek at tidszone står til 1:00, og tryk så på det grønne flueben.
- Gå tilbage til Hjem-skærmen via pilen i nederste venstre hjørne.

Note: når der skiftes til sommertid/vintertid, skal tiden rettes til manuelt ud for teksten Tidspunkt.

Indlæs kalibreringsstrimlerne før brug

- Tryk på **Menu > Kalibreringslots** og tryk så på -knappen (ikon med et stykke papir og et + i hjørnet).
- Tryk på det gule felt ud for Lotnummer. Indtast **11111111** og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det venstre gule felt ud for Udløbsdato. Indtast **2030** og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det midterste gule felt. Indtast **12** og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det højre gule felt. Indtast **31**, og tryk på det grønne flueben.
- Tjek at de indtastede oplysninger er korrekte, og tryk herefter på det grønne flueben.
- Nu er kalibreringsstrimlerne indlæst. Gå tilbage til Hjem-skærmen via pilen i nederste venstre hjørne.

Indlæs urinteststrimlerne før brug

- Tryk på **Menu > Teststrimmellots** og tryk så på -knappen (ikon med et stykke papir og et + i hjørnet).
- Tryk på det gule felt ud for Lotnummer. Indtast **22222222** og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det venstre gule felt ud for Udløbsdato. Indtast **2030**, og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det midterste gule felt. Indtast **12**, og tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det højre gule felt. Indtast **31**, og tryk på det grønne flueben.
- Tjek at de indtastede oplysninger er korrekte, og tryk herefter på det grønne flueben.
- Nu er urinteststrimlerne indlæst. Gå tilbage til Hjem-skærmen via pilen i nederste venstre hjørne.

Udfør kalibrering før første patientmåling - samt hver 7. dag

- Tryk på knappen **Kalibrering** og tryk herefter på det gule felt ud for Lotnr.
Instrumentet vælger automatisk dét lotnummer, der blev tilføjet ovenfor. Tryk på det grønne flueben.
- Tryk på det grønne flueben - nu positioneres slæden automatisk.
- En pop-up besked vises "Placer kalibreringsteststrimlen på teststrimmelslæden". Tag nu en kalibreringsstrimmel op fra Control-Test M bøtten, og læg den direkte i slæden. Tryk på det grønne flueben.
Luk låget på bøtten med det samme.
- Instrumentet varmer op, og udfører herefter kalibreringen. Når kalibreringen er færdig, vises en pop-up besked "Brugerkalibrering gennemført", og kalibreringsrapporten udskrives. Tryk på det grønne flueben, og bortskaf kalibreringsstrimlen.
- Resultaterne vises både på udskrift og på instrumentskærmen. Tjek, at der står "Kalibrering OK", og tryk herefter på Hjem-knappen i nederste venstre hjørne.
- Instrumentet er nu klar til brug til første patientmåling.

Note: **Urisys® 1100** vil anmode om en kalibrering med en ny Control-Test M kalibreringsstrimmel syv dage efter sidste kalibrering. Dette for at sikre korrekte resultater ved brug af systemet.

Første patientmåling efter installation


- Tryk på knappen **Patienttest** og tryk herefter på det gule felt ud for Lotnr. Instrumentet vælger automatisk dét lotnummer, der blev tilføjet i afsnittet “Indlæs urinteststrimlerne før brug” ovenfor. Tryk på det grønne flueben.
- Hvis der anvendes Patient-ID til målingerne, trykkes nu på det gule felt ud for Pat.-ID, hvorefter patientens ID indtastes. Hvis der ikke anvendes Patient-ID til målingerne, efterlades det gule felt ud for Pat.-ID blankt.
- Tag en urinteststrimmel op fra Combur 10 Test® UX botten, og luk låget på botten med det samme.
- Dyp teststrimlen kort (1 sekund) i patientens urinprøve. Undlad at bøje teststrimlen. Træk teststrimlens kant langs prøvebeholderens kant, for at fjerne overskydende urin.
- Læg med det samme teststrimlen i teststrimmelslæden, og tryk på det grønne flueben. Inkubationstiden starter, og målingen går i gang.
- Når målingen er færdig, printes resultaterne, og de vises på instrumentskærmen, og gemmes i hukommelsen. Resultater, som er negative eller normale, vises med sort skrift på skærmen. Resultater, som afviger fra negative- eller normale værdier, vises tydeligt på skærmen med **rød skrift** og en * foran parameteren. Ved udskrift vises kun * ved resultatet, da der ikke printes i farve.
- Bortskaf den brugte urinteststrimmel, og tør eventuelle rester af slæden med en fnugfri klud/spritserviet.
- Tryk på Hjem-knappen i nederste venstre hjørne.

Værd at vide - optionelle indstillinger

Det er muligt at skjule parametre, som man ikke ønsker at se. Alle 10 parametre i Combur 10 Test® UX urinteststrimlen bliver målt hver gang, men kun de parametre man ikke har skjult vises på resultatskærmen og på resultatudskriften. Man kan aktivere parametrene igen, og dermed se de målte resultater ved behov.

Tryk på knappen **Menu > Måling > Outputrækkefølge**.

Tryk på den parameter, der ønskes skjult, så den fremhæves (parameteren får en lyseblå baggrund)

Tryk på -knappen for at skjule parameteren. Når der ses et - (minus) i stedet for et tal foran parameteren, vil resultater for den valgte parameter ikke længere vises.

Tryk på det grønne flueben, og gå tilbage til Hjem-skærmen via pilen i nederste venstre hjørne.

Det er muligt at ændre resultatenhederne, da værdierne kan rapporteres i enten konventionelle enheder, SI-enheder eller arbitrære enheder, eller en kombination af disse. Se afsnittet “Tabel over resultater” i brugervejledningen for eksempler på resultatenheder. Standardværdien er indstillet til SI.

Tryk på knappen **Menu > Måling > Resultatmåleenheder**. Vælg enhed, og tryk på det grønne flueben.

Værd at vide - brug for hjælp

Der henvises til Urisys® 1100 Brugervejledning samt forbrugsvarernes metodeblade for mere information. Ved behov for assistance, kan Roche kundesupport kontaktes på tlf. 7020 0505 (tryk 2 for Point of Care), eller via mail til kundesupport.dk@roche.com.