

Samling af kanylebokse til skarpe genstande

For at sætte låget korrekt på kanyleboksen:

1. Tryk samtidig på to diagonalt modsatte hjørner af låget
2. Gentag dette på de to andre hjørner
3. Afslut ved at trykke midt på låget

Efter hvert tryk bør du høre et klik, som bekræfter, at låget er korrekt monteret.



Midlertidig lukning

Hvis kanyleboksen skal lukkes midlertidigt, benyttes den side af låget, der passer ned i åbningen.



Permanent lukning

Når boksen er fuld, skal den lukkes permanent. Det gør du ved at trykke på den markerede side af låget (hvor det står "BIOHAZARD" på ydersiden). Tryk let – du vil høre et klik, som bekræfter, at boksen er permanent lukket.

OBS: Når låget er lukket permanent, kan det ikke åbnes igen.





SHARPS
CONTAINERS

Bortskaffelse af nåle

Brug beholderen til at bortskaffe brugte skarpe genstande som: Nåle, knivblade, glasdele og andet skarpt smitsomt affald. For at fjerne nålene skal du bruge en af "V"-udskæringerne, og til insulin penkanyler skal du bruge "blomst"-udskæringen.

Anbefaling

Ved påsætning af nålen, bør du undgå at stramme den for hårdt. Efter brug, placeres penkanylen i "blomst"-udskæringen, så den sidder i spænd. Vinkl den cirka 45 grader og drej nålen af ved at skrue mod uret med let hånd – undgå at bruge kraft.



Transport

Efter at beholderen er permanent låst og klar til behandling, skal du bruge beholderens håndtag for lettere manipulation under transport.



Northeast industrial zone
Pinc 2 str. No. 25 - Indjija
Republic of Serbia

www.dpsharps.rs

a brand by
Dunavplast Korp d.o.o.

Vigtige sikkerhedsbemærkninger

- Brug ikke kanyleboksen uden at låget er sat på
- Forsøg ikke at fjerne genstande, der allerede er i beholderen
- Forsøg ikke at åbne beholderen efter at den er permanent lukket
 - Overhold den maksimale fyldningslinje
- Håndtér den fyldte beholder i overensstemmelse med gældende lov
 - Velegnet til autoklaving op til 121 ° C
- Fremstillet af sundhedsvenlige materialer, uden udledning af skadelige gasser under behandling.

Kanyleboksene er modstandsdygtige overfor indtrængning af nåle og skarpe genstande, og er derfor sikre at bruge, så længe de anvendes i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner.