



Varenummer 150124

Øjenskyl, 1000 ml, uden farve og parfume



Produktbeskrivelse

Øjenskyl, Sterisol 1 liter anvendes til skylning af øjne. Sådan gør man: slå med hånden på den grønne beskyttelseshætte på flasken. Fjern den grønne hætte som nu er løsnet. Har et skadeligt stof ramt øjet er følgende 3 ting vigtige: 1. begynd straks skyllingen for at undgå alvorlige skader. Skyl konstant, også ved transport til den faste øjeskyllestation eller lægen. 2. Fortsæt skyllingen længe. Tidslængden afhænger af, hvilket stof øjet er ramt af. Lad lægen afgøre, hvornår skyllingen skal ophøre. Hav derfor altid en ekstra flaske med i reserve. 3. Ofte kræves begge hænder til at holde øjet åbent. Kald derfor hurtigt på hjælp.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyl
Features	Uden farve og parfume
Ingredienser/sammensætning	0,9% isotonisk natrium chlorideopløsning
Rumindhold, brutto	1000 ml
Certifikater	CE
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Sådan gør man: slå med hånden på den grønne beskyttelseshætte på flasken. Fjern den grønne hætte som nu er løsnet. Har et skadeligt stof ramt øjet er følgende 3 ting vigtige: 1. begynd straks skyllingen for at undgå alvorlige skader. Skyl konstant, også ved transport til den faste øjeskyllestation eller lægen. 2. Fortsæt skyllingen længe. Tidslængden afhænger af, hvilket stof øjet er ramt af. Lad lægen afgøre, hvornår skyllingen skal ophøre. Hav derfor altid en ekstra flaske med i reserve. 3. Ofte kræves begge hænder til at holde øjet åbent. Kald derfor hurtigt på hjælp.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	50 cm	21.9 cm	32.5 cm	27392173046617



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.