



Varenummer 150667



## Overfladedesinfektion servietter, ABENA, 20x20cm, 70% ethanol, dispenserbox med 150 servietter.

- ✓ Overfladedesinfektion
- ✓ fødevarerodkendt
- ✓ CEI vurderet

### Produktbeskrivelse

ABENAs servietter til overfladedesinfektion virker hurtigt og effektivt over for et bredt spektrum af bakterier, mykobakterier, vira (herunder HB-V, HIV, HCV, Vaccina, Rota, Noro, Adeno) samt svampe og gær. Desinfektionsservietterne kan anvendes på alle overflader, og er en yderst effektiv måde at sikre en god hygiejne. Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren. Produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen journal nummer J.nr.: 2023-29-7105-00272.



### Specifikationer

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                  | Overfladedesinfektion servietter  |
| Varemærke                          | ABENA   |
| Farve                              | Hvid  |
| Features                           | 70% ethanol, dispenserbox med 150 servietter.   |
| pH-værdi (konc.)                   | 6,5-7,5   |
| Længde/dybde                       | 20 cm   |
| Bredde                             | 20 cm   |
| Produkt- eller teststandarder      | EN 14563, EN 1276, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 1650, EN 16615  |
| Direktiver, lovgivning og regler   | BPR EU 528/2012   |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen. |
| Holdbarhed                         | 36 måneder  |
| Holdbarhed, åbnet                  | 12 måneder  |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.  |
| Bortskaffelse af produkt           | Aflleveres på miljøstation.   |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.   |

### Brugsanvisning

ABENAs Overfladedesinfektionsservietter er klar til brug. Luk låget på dispenserstraks efter, der er udtaget en klud, så fordampning minimeres. Overfladen der ønskes desinficeret, skal rengøres og tørres af forinden. Under desinficeringen, skal overfladen eller genstanden holdes fugtig med wipen i mindst 30 sekunder for at opnå den ønskede effekt.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kll   | 6 pk       | 33.6 cm | 25.8 cm | 28 cm | 5703538325151 |
| pk    | 150 stk    |         |         |       | 5703538111624 |



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.

