



Varenummer 150766

## Protesetablet, Steradent, 30 tabs

✓ Effektiv protesepleje



### Produktbeskrivelse

Steradents All in One aktiverer tusindvis af mikrobobler som fører den aktive oxygen rundt om hele protesen og fjerner 99,9% af alle bakterier. Effektiv rengøring i dybden, hvor tandbørsten ikke kan nå ind.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesetablet
Varemærke	Steradent
Features	30 tabs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Brug Steradent 2 gange dagligt: skyl protesen, og placer én tablet, samt protesen i et glas. Fyld glasset med varmt vand, så det dækker protesen og lad protesen ligge i 10 min. Brug ikke kogende vand, da protesen kan tage skade. Skyl protesen grundigt før den sættes på plads.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	15.2 cm	11.4 cm	18.6 cm	5701092406866



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.