

Coflex® TLC Zink

Coflex® TLC Calamine

Millikens CoFlex TLC Zinc og Coflex TLC Calamine er et 2-lags kompressionssystem, som består af 2 lag, der specielt er fremstillet til staseeksem, dermatitis, kløende og/eller irriterede dermatologiske tilstande.



Egenskaber:

- Latexfri
- Coflex Zinc, lag 1, komfortlaget er en blød polyuretanskum imprægneret med en salve, der indeholder 18% zinkoxider. Zinkoxider har en lindrende og beskyttende effekt
- Coflex Calamine, lag 1, komfortlaget er en blød polyuretanskum imprægneret med en salve, der indeholder 15% zinkoxider og 3% calamin powder med jernoxider. Zink og jern arbejder sammen, så det er med til at nedsætte rødme, irritation og dermatitis
- Både Coflex Zinc og Coflex Calamine lindrer, beroliger og plejer huden og kan anvendes ved kronisk venøse bensår, staseeksem, dermatitis og let lymfødem
- Lag 2 er et unik fugtighedsresistent selvklebende kompressionsbind. Lag 1 og lag 2 hæfter sig til hinanden, så der ikke er yderligere brug for fiksering
- Hurtig reduktion af eksem, dermatitis og ødem
- Visuelle indikatorer som gør, at det er teknisk nemt at anlægge og som sikrer en vedvarende stationær kompressionsbehandling
- Emballagen inkluderer en QR-kode, der linker til en applikationsvideo, hvilket gør det nemt at få vejledning ved anlæggelsen
- Alle sæt indeholder en nylonstrømpe, der holder bandagen på plads efter anlæggelse og forhindrer tøj i at "klæbe" til bandagen
- Bandagen gør det nemt at bruge almindeligt fodtøj
- Høj patientkomfort – bedre compliance
- Bandagen kan ligge i op til 7 dage, såfremt patientens tilstand tillader det. Efter første bandagering anbefales skift på 2.-3. dagen, da ødemreduktionen kan være kraftig

Vigtig vejledning

Før man opstarter kompressionssbehandlings med Coflex, er det vigtigt at have et billede af det arterielle kredsløb, dette kan opnås ved at måle det distale blodtryk og udregne et Ankel Arm index. Kompression er altid lægeordineret.

Ankel Arm Index på ≥ 0.8

CoFlex Zinc el. Calamine TLC

Ankel-Arm Index 0.5 - 0.8 eller lav kompressionstolerance

CoFlex Zinc Lite el. Calamine TLC Lite

CoFlex Zinc el. Coflex Calamin TLC må ikke anvendes ved AAI < 0,5.



Varenummer	Materiale
1999900106	Kompressionssæt, Coflex TLC Zinc Lite, 2-lags, 6,4m x 7,5cm, lag 2 er med visuel indikator
1999900107	Kompressionssæt, Coflex TLC Zinc Lite, 2-lags, 6,4m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator
1999900108	Kompressionssæt, Coflex TLC Zinc Standard, 2-lags, 6,4m x 7,5cm, lag 2 er med visuel indikator
1999900109	Kompressionssæt, Coflex TLC Zinc Standard, 2-lags, 6,4m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator
1999915474	Kompressionssæt, Coflex TLC Calamine Standard, 2-lags, 6,4m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator
1999915475	Kompressionssæt, Coflex TLC Calamine Lite, 2-lags, 6,4m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator

Milliken.