



Produktdatablad

Engangsklud med klor, vand og sæbe, 20x30 cm, 10 stk

Varenummer: 1999900222



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Overfladedesinfektion. Varemærke: Wet Wipe. Holdbarhed: 24 måneder. Holdbarhed, åbnet: 7 dage. Features: med 2000 ppm aktiv klor, vand, 10 stk. pH-værdi (konc.): 6-8. Størrelse: Mini. Længde/dybde: 30 cm. Bredde: 20 cm. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Ingen. Produktbeskrivelse: Wet Wipe Disinfection engangsklude er imprægnerede med klor i pulverform. Pakken indeholder en crackingpose med vand. Når posen er brudt, løber vandet ud i kludene, som er klar til brug efter 7 minutter. Med Wet Wipe Disinfection med klor opnår du en optimal og enkel desinfektion i forhold til traditionelle desinfektions-metoder. Desinficerer effektivt mod clostridium difficile, alle kendte virusfamilier, bakterier, sporer, skimmel- og gærsvampe samt indkapslede vira (HIV og Hepatitis B). Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på alle overflader, der tåler klor. Husk at rengøring og desinfektion udføres i to arbejdsgange - dvs. en klorklud til rengøring ved synlig organisk kontaminering og dernæst en ny ren klorklud til desinfektion. Bemærk De aktiverede og brugsklare engangsklude bevarer desinfektionseffekten op til 7 dage efter aktivering. . Brugsanvisning: Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på overflader der tåler klor. 10 minutters kontakttid. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder. Undgå kontakt med øjnene. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.