

independence with confidence

Ugo fix™
catheter strap
(kateterremme)



Designet til at understøtte
uretrale og suprapubiske
systemer

www.optimummedical.de



optimummedical®


Ugo fix

catheter strap

(kateterrem)

Hos **Optimum Medical** forstår vi behovet for sikker og pålidelig fiksering af kateter og benpose.


Vi har udviklet **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) til at give komfortabel støtte, således at patienten føler sig sikker nok til at bevæge sig frit rundt.

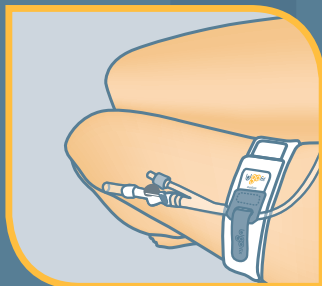

Brug af **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) på oversiden af ben



Brug af **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) på maven

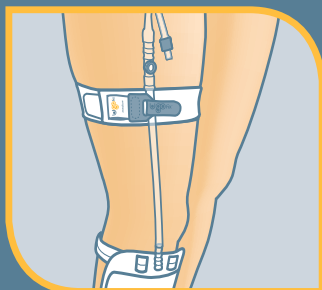


Brug af **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) på slange til benpose

Ugo Fix Catheter Strap (kateterrem) er udviklet til at understøtte uretrale og suprapubiske katetre. Den kan fikseres om katetret eller benposens slange efter ønske.

Primære fordele:

- Fastholder slangen samme sted, så der ikke opstår tryk på urinrør eller blærehals, men tillader alligevel naturlig bevægelse.
- Understøtter effektivt vægten af benposen ved brug sammen med **Ugo Fix Sleeve** (manchet).
- Behageligt og enkelt design.
- Tydelige brugsinstrukser sikrer korrekt tilpasning.
- Genbrugsegnet og vaskbar hypoallergen stofrem.
- Silikoneteknologi sikrer fastholdelse på huden uden forskydning eller irritation

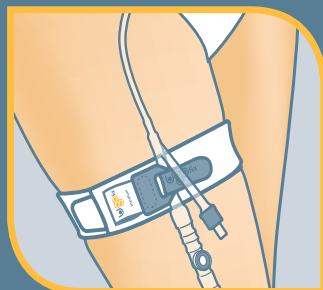

Brug af **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) på kateterforgrening



Vi anbefaler at **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterrem) udskiftes dagligt, eller før hvis remmen bliver forurennet. For at gøre det lettere, har vi pakket remmene i sæt med 5 stk. af hensyn til den daglige brugs- og vaskecyklus. For at fastholde **Ugo Fix Catheter Strap** (kateterremmens) optimale ydeevne anbefaler vi, at patienten vasker remmen i en vaskepose. Til hjælp med dette leverer vi en vaskepose med hver kasse **Ugo Fix Catheter Strap** LATEX FREE (kateterremme).

LATEX FREE


Sådan bruges Ugo Fix Catheter Strap (kateterrem)

Inden brug er det vigtigt, at du måler rundt om benet eller omkring maven og bruger den korrekte længde.

Inden fastgørelse af slange/kateter

- 1 Placer remmen rundt om enten den øverste del af benet eller maven i den ønskede placering med silikoneslanger vendt indad mod huden.

Sørg for at remmen ikke er for stram og at **Ugo Fix** båndet sidder, hvor det er let at komme til.

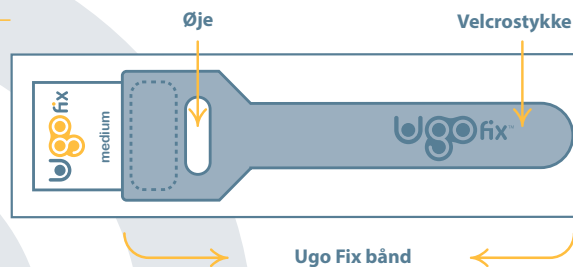

Fastgørelse af slange/kateter

- 2 Løft **Ugo Fix**-båndet og (a) før det over og under slangen og derefter (b) gennem øjet.

- 3 Sørg for at **Ugo Fix**-båndet sidder det ønskede sted og har godt fast i slangen, fastgør herefter velcestykket på remmen.

- 4 Kontroller til sidst, at der ikke trækkes i katetret, når du står op, og at du kan bevæge dig frit og komfortabelt med katetret på plads.



Varenummer	PIP kode	NPC kode	Produktbeskrivelse	Æske	Karton
603001	393-3371	n/a	Ugo Fix Catheter Strap ekstra kort - 35 cm	5 Stk.	50 Stk.
603002	393-3389	FSS1068	Ugo Fix Catheter Strap kort - 45 cm	5 Stk.	50 Stk.
603003	393-3397	FSS1069	Ugo Fix Catheter Strap medium - 80 cm	5 Stk.	50 Stk.
603009	393-3405	FSS1070	Ugo Fix Catheter Strap lang - 130 cm	5 Stk.	50 Stk.
603010	393-3413	n/a	Ugo Fix Catheter Strap ekstra lang - 180 cm	5 Stk.	50 Stk.



optimum medical
support™



Træning og uddannelse for optimering af patientpleje

Besøg www.optimummedicalsupport.co.uk for at lære mere.

MILJØPOLITIK



Som producent af medicinske produkter er vi bevidst om, at vi har et ansvar for at begrænse vores påvirkning af miljøet og for at bevare naturlige ressourcer. Vi tilstræber at anvende den mindst mulige emballagestørrelse for at minimere materialeforbrug og deraf belastning af miljøet.



Ved transport af produkter sørger vi for at vores transportfunktioner er så effektive og miljøvenlige som muligt.

Alle trykte materialer er 50% genbrug og certificeret i henhold til FSCs CoC-Kæde-program



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Mediplast AS

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00 | info.dk@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

