



Varenummer 199901635

## Forlænger, Juzo Compression Wrap, sort/beige



### Produktbeskrivelse

Juzo Compression Wrap er et variabelt kompressionssystem, der kan anvendes som alternativ til traditionel kompressionsbind. Her er det især vigtigt at rense såret grundigt og pålægge sårbandage før kompressionsbandagen lægges på. Juzo Compression Wrap har et højt arbejdsstryk og et lavt hviletryk, hvilket skyldes dets uelastiske egenskaber. Burrebåndslukning og gribezoner gør det nemt at lægge bandagen på, og kan tilpasses variabelt legemsomfang. Specielle indkærvninger sørger for, at der ikke dannes vinduesødemer mellem overlapningerne. Indikationer: primær og sekundær varikose, kronisk venøs insufficiens, posttrombotisk syndrom, ulcus cruris venosum og før/efter venekirurgiske indgreb. Lægsegment: to længder (normal/lang), 10 standardstørrelser, inkl. stockinette ("understrømpe"). Variabelt kompressionstryk 30-60 mmHg.

### Specifikationer

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse            | Forlænger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Varemærke                    | Juzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vareserie                    | Compression Wrap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Features                     | Sort/beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingredienser/sammensætning   | 88% polyamid, 12% elasthan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certifikater                 | CE. MD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opbevaringsinstruktioner     | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vaskeanvisninger             | Før vask af produktet lukkes alle velcrolukninger eller fjernes hvis løs. Vask Juzo Compression Wrap mindst en gang om ugen eller oftere, hvis det er nødvendigt. Produkterne kan vaskes i vaskemaskinen ved 30°C med et mildt vaskemiddel. Produktet kan beskyttes ved at vaske det i en vaskepose. Undlad at bruge skyllemiddel. Må ikke bleges. Må ikke tørres i tørretumbler. Tørretiden kan afkortes ved at rulle dem stramt og trykke væsken ud og derefter placere dem på et tykt frottehåndklæde. Placer ikke produktet på en radiator eller i solen for at tørre. Juzo Compression Wrap må ikke stryges. Rens ikke produktet med kemikalier. |
| Bortskaffelse af produkt     | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan gennanvendes eller forbrændes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 31 cm  | 21 cm  | 4 cm  | 4062102643918 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.