

Reskin Care Protect

OPTIMAL BESKYTTELSE AF INTAKT HUD



FOREBYGGER • BESKYTTER • AFLASTER



Nem at anvende:

Klippes til efter behov - kræver ikke ekstra fiksering.

Bi-elastisk:

Former sig efter kroppens konturer, følger bevægelser, reducerer risiko for friktionsskade.

Åndbar:

Huden forbliver hel - ingen risiko for maceration.

Skånsom mod huden:

Fjernes atraumatisk og smertefrit.

Blød silikoneklæber:

Forbliver på plads uden at rulle i kanten.

Kan genplaceres uden at miste sin klæbeevne.

Lycra


- bi-elastisk
- åndbar

Silikoneklæber

- hudvenlig
- atraumatisk

Beskyttelsespapir

- optimal frigørelse

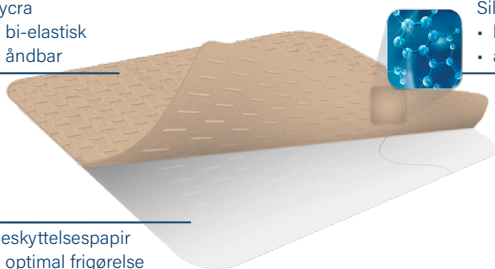

Anvendelse



- Påsættes ren og tør hud.
- Skal dække hele det udsatte område, gerne 2-3 cm udover området.
- Fjern bagside filmen og placér forbindingen i ustrakt tilstand.
- Kan bæres i brusebad, duppes da tør.
- Kan tages af ifm. bad og påsættes igen.
- Skiftes efter behov.

Ved sport/motion

Ved motion og sport, uanset niveau, kan huden på udsatte steder blive belastet med hudskader, sår og risiko for infektion til følge - dette kan forebygges.

Når huden udsættes for vedvarende friktion fra fx. stropper, linning eller syninger i forbindelse med sport/motion, kan der opstå rødme, hudløshed og smerte. Hudskaderne kan være meget generende og hæmme udøvelsen af bevægelse/sport.

Forebyg hudskader under sport

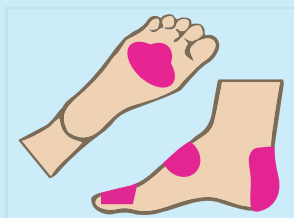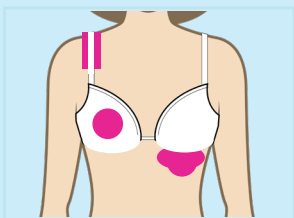

- På brystvorter
- I linningen
- Under stropper
- I hæl området
- På fodballer
- I skridtet
- Under cykelhjelm





Ved skrøbelig og udsat hud

Skrøbelig hud, der er udsat for friktion, tryk eller slag, er i stor risiko for at udvikle sår, flænger og andre overfladiske hudskader.

Sår og hudskader kan være smertefulde, tage lang tid om at hele og øger risiko for udvikling af infektion. Det kan påvirke livskvaliteten i kortere eller længere tid.

Forebyg hudskader på skrøbelig hud

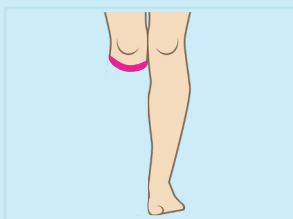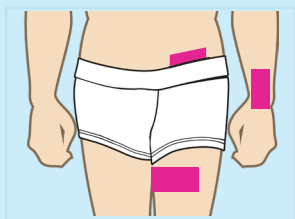

- Skrøbelig hud/fare for flænger
- Hud-mod-hud friktion fx. inderside af lår, i lyske, under brystet
- Over helede sår/ar
- Over vabler med huddække
- Under proteser/ortoser
- Under masker og andet medicinsk udstyr





Ved brug af værnemidler

Ved pleje af patienter med smitsomme sygdomme er det nødvendigt at beskytte mod smitte og afbryde smitteveje. Ved diverse håndværks- og rengøringsopgaver er det desuden nødvendigt at beskytte sig mod forurening.

Til dette formål anvendes forskellige personlige værnemidler, såsom åndedrætsværn, ansigtmasker og visir. Ved længere tids brug er der risiko for, at huden tager skade som følge af varme, fugt, tryk og friktion.

Forebyg hudskader, mens du beskytter dig selv

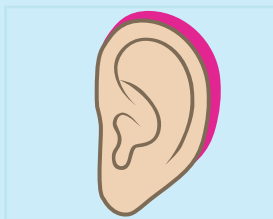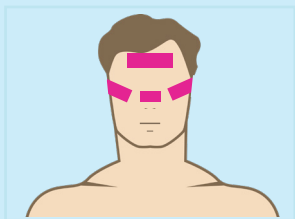

- På panden under visir
- På næseryg og kindben under maske
- Bag ører ved mundbind med elastik





Reskin Care Protect

Vare nr.	Størrelse	Antal i pose
SDSC-19B	5 x 25 cm	1 stk

Reskin Care Protect er usteril, og bør kun anvendes på intakt hud.

CE-mærket efter Direktivet for Medicinsk Udstyr.

Opbevares tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.

Holdbarhed 5 år efter produktionsdato.

Læs endvidere informationer på pakningen.

Bestil Reskin Care Protect på www.apodan.dk



Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk