



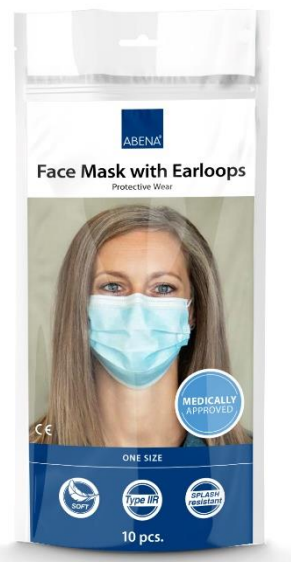

Produktdatablad

Abena mundbind med øreelastikker, Type IIR varenr. 1999902619

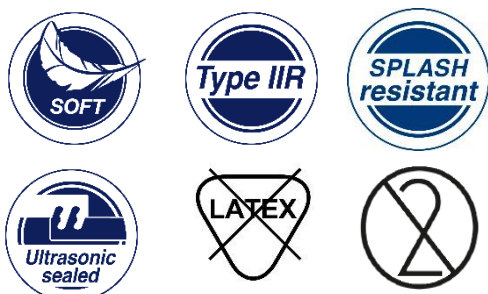

Beskrivelse:

Ansigtmasker med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god pasform og gør det komfortabelt at have på. Maskerne har en lav respirationsmodstand samt høj bakteriefiltrering. Ansigtmasken har ultrasonic sømme og er usteril. Materiale: PP, spandex og aluminium.

Anvendelse:

Maskerne anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i operationsstuer eller i omgivelser med lignende hygiejnekrav for at mindske krydskontaminering. Patient og omgivelserne beskyttes imod smitte og brugeren imod stænk og sprøjt med et tryk på 120 mmHg.

Form næseklemme og anbring masken på ansigtet, sørg for at dække næsen og munden. Sæt øreelastikkerne rundt om ørerne. Masken påtages med det farvede lag yderst og foldes altid helt ud. Øreelastikkerne gør den let at bære samt fjerne.

CE & Standarder

CE-mærket iht. EU Regulativet for medicinsk udstyr (MDR) 2017/745 Annex VIII, Klasse 1.
Type IIR godkendt i henhold til EN 14683:2019.

Test og krav ift. medicinsk ansigtmasker

EN 14683:2019			
Klassificering	Type 1 ^a	Type II	Type IIR
Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Respirationsmodstand (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 60
Væskegennemtrængning (kPa)	Kræves ikke	Kræves ikke	≥ 16,0
Mikrobiel renhed (CFU/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a. Type I medicinske masker bør kun anvendes til patienter og andre personer for at mindske risikoen for spredning af infektioner i tilfælde af epidemi eller pandemi. Type I masker er ikke tiltænkt at blive anvendt af sundheds- og sygehuspersonale på en operationsstue eller andre medicinske områder med tilsvarende krav.



Produktdatablad

Forpakning:

10 styk i en pose, 15 poser pakket i displayboks med tear-off åbning, 6 displaybokse pakket i yderkarton

Opbevaringsinstruktioner, holdbarhed og bortskaffelse af emballage

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Holdbarhed - uåbnet: 3 år


Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes

Varenr.	Produkt	Str.	Kvalitet	Stk. pr. ps/pk/kl
1999902619	Mundbind med øreelastikker, Type IIR	17x18	3-lags	10/150/900

Brugervejledning




1
Vask hænder inden mundbindet tages på.

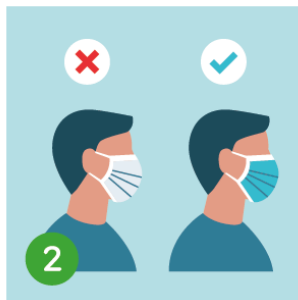

2
Sørg for, at mundbindets blå side vender udad.



3
Find metalstriben og placer den på næseryggen.

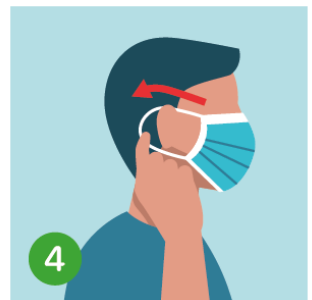

4
Fastgør elastikbåndene bag begge ører.



5
Dæk næse og mund helt. Der må ikke være mellemrum i siderne.



6
Tryk metalstriben ned, så den sidder fast på næsen.



7
Rør ikke mundbindet under brug. Vask hænder, hvis du gør.



8
Udskift mundbindet, hvis det bliver fugtigt. Genbrug ikke.



Produktdatablad

Alternativ

Se nedenstående alternativ:

Varenr.	Produkt
1000010123	Ansigtmaske med øreelastikker, Type IIR, 50 stk