


PEP-Fløjte

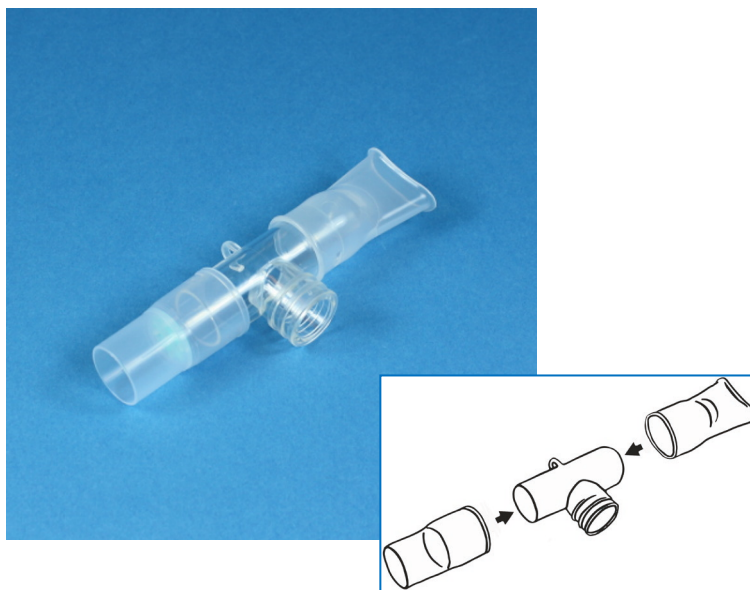

Indikation

PEP-fløjten anvendes til patienter, der er plaget af sekret i lungerne, f.eks. patienter med KOL, lungefibrose eller lungebetændelse.

PEP-fløjten giver ved hjælp af modstandsstudser modstand mod den luft, patienten blæser ud gennem fløjten. Modstanden gør, at der skabes et øget tryk i mundhulen, som forplanter sig ned i lungerne og udvider luftvejene. Derved kan luften komme om bag ved sekret og løsne det.

PEP står for Positive Expiratory Pressure - positivt tryk ved udånding.

Hvilket niveau af modstand der skal anvendes, tilpasses individuelt.

Brugerinstruktion

PEP-fløjte, inklusiv valg af modstand og antal pust, anvendes efter ordination af læge eller lungefysioterapeut.

1. Sæt delene sammen som beskrevet på billedet på emballagen.
2. Montér separat modstand på PEP-fløjstens midterste del.

Artikelnr	Beskrivning	Avd/Trp fp
30015-MV	PEP-fløjte	50/50

Teknisk specifikation

PEP-fløjten er samlet af følgende dele:

T-stykke med ophængkrog	PC-materiale, 22OD/19ID og 22OD/19 ID, 15ID
Mundstykke	PP-materiale, 22ID
Envejsventil	PP-materiale og ventil i silikone, 22OD

Modstandsstudser til PEP-fløjten skal købes separat!

