



# Oxivir Excel Wipe

## Rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasive medicinske emner og ikke porøse overflader

### Beskrivelse

Diversey Oxivir Excel Wipe er en kombination af et rengørings- og desinfektionsmiddel, der udnytter AHP-teknologien. Diversey Oxivir Excel Wipe giver dig det bedste alternativ til en traditionel desinficering, idet det yder total virucidal virkning på kun 30 sekunder. Produktet er skånsomt over for overflader og samtidig uden risiko for dine ansatte, kunder, gæster, patienter eller besøgende. Den aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes på få minutter til de ufarlige stoffer vand og oxygen. Diversey Oxivir Excel CE er derfor et miljøvenligt produkt, som ikke efterlader farlige stoffer eller ændrer overfladernes egenskaber.

### Centrale egenskaber

- Fuld virucidal virkning på kun 30 sekunder.
- Hurtig virkning over for et bredt spektrum af vira, bakterier og gærsvampe.
- Fremragende rengøringsegenskaber som overfladeaktivt middel.
- Duftfrit.
- Afskylning ikke påkrævet.
- Miljøvenligt over for omgivelser og brugere, da det nedbrydes til vand og oxygen og ikke til stoffer af typerne APE, NPE og VOC.
- Det aktive indhold nedbrydes til vand og ilt

### Fordele

- Den bredspektrede virkning yder et højt desinfektionsniveau. Vidtgående testet efter EU-normer (EN-test). Høj effekt over for et stort antal sygdomsfremkaldende stoffer. Fuld virucidal virkning over for såvel Polio, Adeno og Murine norovirus som indkapslet virus, fx HIV, HBV, HCV, Influenza, VACV og Coronavirus. Sikkert for brugerne. Kræver ikke PPE. Ingen fareklassificering.
- Fremragende rengøringsegenskaber, der er ti gange hurtigere end din normale desinfektion.
- AHP-indholdet er mildt over for overfladerne, hvilket øger deres levetid.
- Ingen rester på overfladen.
- Velegnet til brug i højrisiko-områder i butikker, undervisningslokaler, sundhedsvæsenet og i mange andre områder.
- Forbedrer desinfektionsvirkningen med 35 %.

### Brugsanvisning

1. Fjern synligt snavs.
2. Luk pakken med klude op, tag en enkelt klud og luk låget.
3. Indgnid overfladen med kluden, vær sikker på, at hele overfladen er fugtig, lad overfladen tørre.
4. Sørg for, at overfladen forbliver fugtig i den krævede kontakttid.



© A.I.S.E.



# Oxivir Excel Wipe

5. Udskift kluden, når den ikke længere kan fugte overfladen, når den er blevet snavset, eller når et nyt område skal rengøres.

## Tekniske data

Udseende: Klud af polypropylen

Duft: Neutral

pH-værdi (under brug): 1,95: Relativ vægtfylde (20°C): 1,00 g/mL

Holdbarhed: 720 dage

*Ovenstående data er typiske ved en normal produktion, men må ikke opfattes som en specifikation.*

## Sikker håndtering og opbevaring

En fuldstændig vejledning om håndtering og opbevaring findes i et separat sikkerheds datablad – kan downloades på: [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Skal opbevares i originalemballagen og i et område uden ekstreme temperaturer. Må kun benyttes af professionelle brugere eller specialister. Reagerer med oxiderbare stoffer.

## Produktets forenelighed

**Vigtigt:** Bland ikke produktet med andre stoffer. Brug det ikke på vand- eller syrefølsomme overflader.

Under anbefalede brugsomstændigheder er Diversey Oxivir Excel Wipe velegnet til brug på de fleste normalt forekommende materialer som fx: Rustfrit stål, chrom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og bløde plastgenstande (polypropylen, polyurethan, polyethylen, plexiglas, fiberglas og polycarbonat).

## Mikrobiologiske testdata

Se oversigten med EN-test her: Egenskaber testet efter forskellige europæiske standarder.

Test er foretaget under urene forhold.

### Bakteriedræbende egenskaber/kontaktid

EN1276\* / 1 minut

EN13727 / 30 sekunder

EN16615 / 1 minut

### Gærsvampedræbende egenskaber

EN1650\* / 5 minutter

EN13624 / 5 minutter

EN16615 / 1 minut

### Virusdræbende egenskaber

EN14476 / 30 sekunder

(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)

\* Test er udført på urene ikke-medicinske overflader

## Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer i produktet er bionedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

## Emballagestørrelser

Diversey Oxivir Excel Wipe CE findes i følgende størrelser og emballage:

Flowpack-emballage i kasser á: 12x30 stk. og 12x100 stk. AHP®, Design og Oxivir® er registrerede varemærker hos Diversey, Inc.