


Curea P2®


Superabsorberende bandage med atraumatisk sårkontaktlag

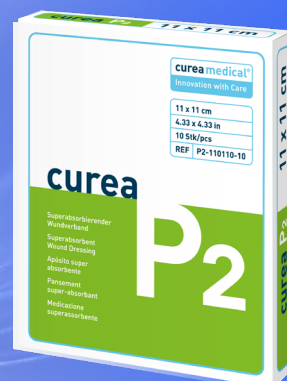

curea medical

Innovation in Care

Integreret ikke-hæftende 3D sårkontaktlag sikrer atraumatisk forbindsskift.

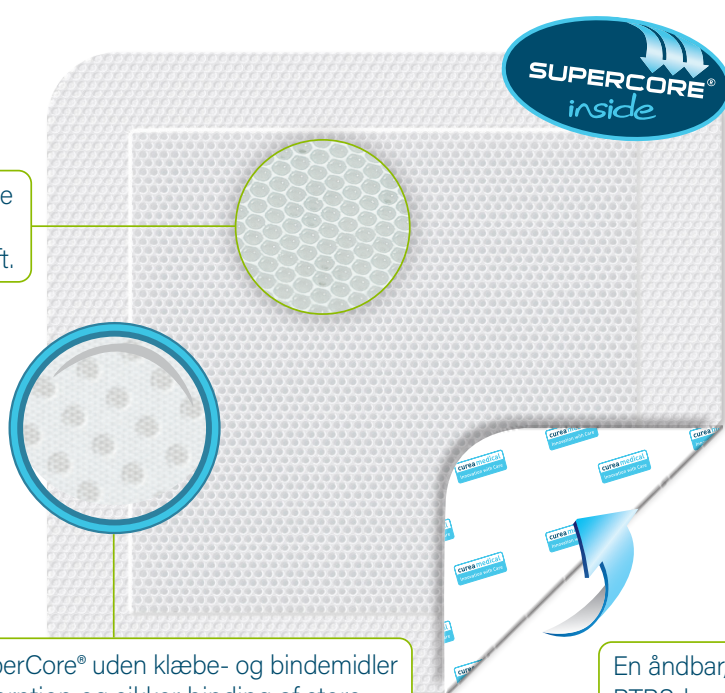

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

En åndbar, væske- og bakterietæt BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt sårmiljø og forebygger kontaminering.

Curea P2 - funktion & fordele:


- Unikt 3D sårkontaktlag sikrer atraumatisk forbindsskift – beskytter sårbund og nyt granulationsvæv – minimerer smerter ved forbindsskift.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

Curea P2 - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Særdeles velegnet til sår med granulerende sårbund og skrøbelige hudomgivelser, samt ved sår, hvor der er smerter i forbindelse med forbindelsesskift.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Siden med tekst skal vende væk fra såret.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

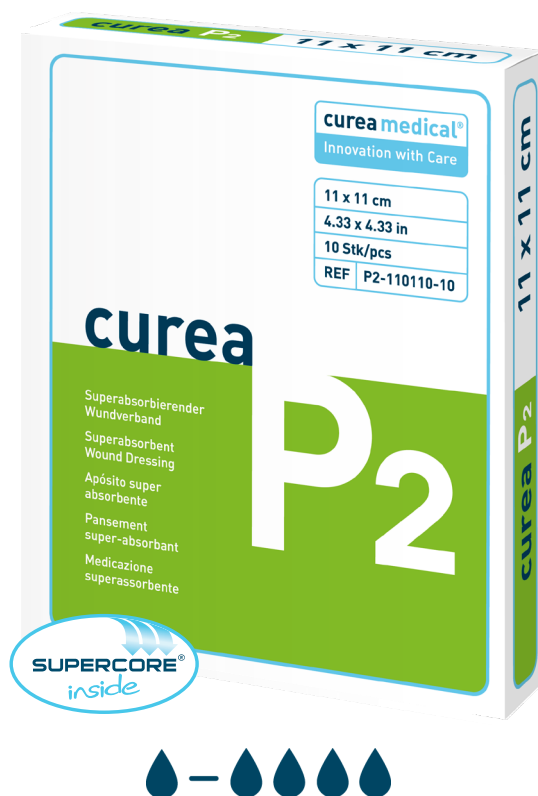

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P2-055075-10	Curea P2	5,5 x 7,5 cm	3,5 x 5,5 cm	10
P2-110110-10	Curea P2	11 x 11 cm	9 x 9 cm	10
P2-150150-10	Curea P2	15 x 15 cm	13 x 13 cm	10
P2-100200-10	Curea P2	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10
P2-200200-10	Curea P2	20 x 20 cm	18 x 18 cm	10
P2-200300-10	Curea P2	20 x 30 cm	18 x 28 cm	10
P2-250550-10	Curea P2	25 x 55 cm	20 x 50 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk