

Spycra Roll

SKÅNSOM BRUSETÆT FIKSERING - TIL SART OG SKRØBELIG HUD

Spycra Roll

Usteril tynd transparent film med silikoneklæb på rulle

Atraumatisk

Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering.

Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er særdeles velegnet til skrøbelig hud.

Høj bærekraft og brusetæt

Meget blød og fleksibel - former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser.

Åndbar, væske- og bakterietæt film - beskytter mod forurening og muliggør brusebad.

Enkel i brug

Enkel at applicere med meget få greb.

Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering. Kan re-appliceres ved evt. folder i filmen efter applicering.

Kan klippes i passende længde. Efterlader ikke silikonerester på huden.



Anvendelse:

1. Appliceres på ren og tør hud
2. Klip den ønskede længde
3. Fjern beskyttelsesfoliet og applicér filmen ustrakt
4. Tryk filmen fast til huden for at sikre god tilhæftning
5. Fjern de 2 grønne appliceringssider ved at trække siderne væk fra filmen
6. Ret evt. folder og glat forsigtigt filmen, så den sidder godt på huden
7. Kan sidde i op til 7 dage, afhængig af hudens tilstand og klinisk vurdering

Indikationer:

Anvendes på intakt hud, da filmen er usteril

- Fiksering af primær sårbandage
- Fiksering af slanger, dræn og katetre
- Landingzone under kraftigt klæbende produkter
- Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, ex. mod friktion



Spycra Roll, usteril film med silikoneklæb på rulle

Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
SR-55	Spycra Roll, usteril	5 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker
SR-105	Spycra Roll, usteril	10 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker
SR-155	Spycra Roll, usteril	15 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker

Usteril – bør kun anvendes på intakt hud.

Holdbar 5 år efter produktionsdato.

Advarsel:

Må ikke anvendes som primær fiksering af IV-kanyler, IV-porte eller anden infusionsudstyr over indstiksstedet. Læs i øvrigt instruktionen i æsken før brug.